

21
AÑOS



LABORATORIO DE REFERENCIA ELI[®] S.A. DE C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología



CATÁLOGO DE SERVICIOS 2023

Favor de leer todas las páginas que acompañan la lista de precios

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN	PÁGINA
NOSOTROS	1
UBICACIÓN	2
DIRECTORIO	3
CALIDAD Y CONFIANZA EN EL SERVICIO	4
POLÍTICAS SOBRE LA ENTREGA DE RESULTADOS	6
LÍMITE DE LA CORRESPONSABILIDAD	7
INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA	8
SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA	9
SOLICITUD DE ALERGENOS	10
CUESTIONARIO PARA ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO (BIOPSIA, BAAF O CITOLOGÍA)	12
CUESTIONARIO PARA MARCADOR GESTACIONAL EN SUERO	13
CUESTIONARIO PARA CARIOTIPO	14
CUESTIONARIO PARA FENOTIPO INMUNOLÓGICO	15
CRITERIOS GENERALES DE ACEPTACIÓN DE MUESTRAS	16
TOMA DE MUESTRAS POR VENOPUNCIÓN	17
TOMA DE MUESTRAS PARA EL TAMIZ NEONATAL	18
CRITERIOS GENERALES DE RECHAZO DE MUESTRAS	22
SOLICITUD DE MATERIAL PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS	23
ASESORÍA TÉCNICA, QUEJAS Y SUGERENCIAS	24
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE MICROBIOLOGÍA	25
LISTA DE ESTUDIOS Y PRECIOS	29
PAGINA WEB Y FACEBOOK	97
MARSA, ALIADO COMERCIAL	98



NOSOTROS



En Laboratorio de Referencia Eli contamos con más de 20 años de experiencia, atendemos a más de 1500 clientes en 22 estados de la República Mexicana, incluyendo la CDMX.

Tenemos una capacidad instalada que permite el proceso de más de 4000 muestras al día, las cuales son procesadas en instalaciones y equipos con tecnología de vanguardia, por personal competente, en un flujo de trabajo que opera 24 horas de lunes a sábado y con un alto compromiso sobre la confiabilidad y la calidad del servicio ofrecido en las siguientes disciplinas:


- ✓ Química clínica
- ✓ Inmunoquímica e Inmunología
- ✓ Hematología
- ✓ Coagulación
- ✓ Uroanálisis
- ✓ Parasitología
- ✓ Microbiología
- ✓ Tamiz neonatal
- ✓ Electroforesis e inmunofijación
- ✓ Biología molecular
- ✓ Patología clínica



UBICACIÓN



Félix Parra No. 39, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900 en Ciudad de México.

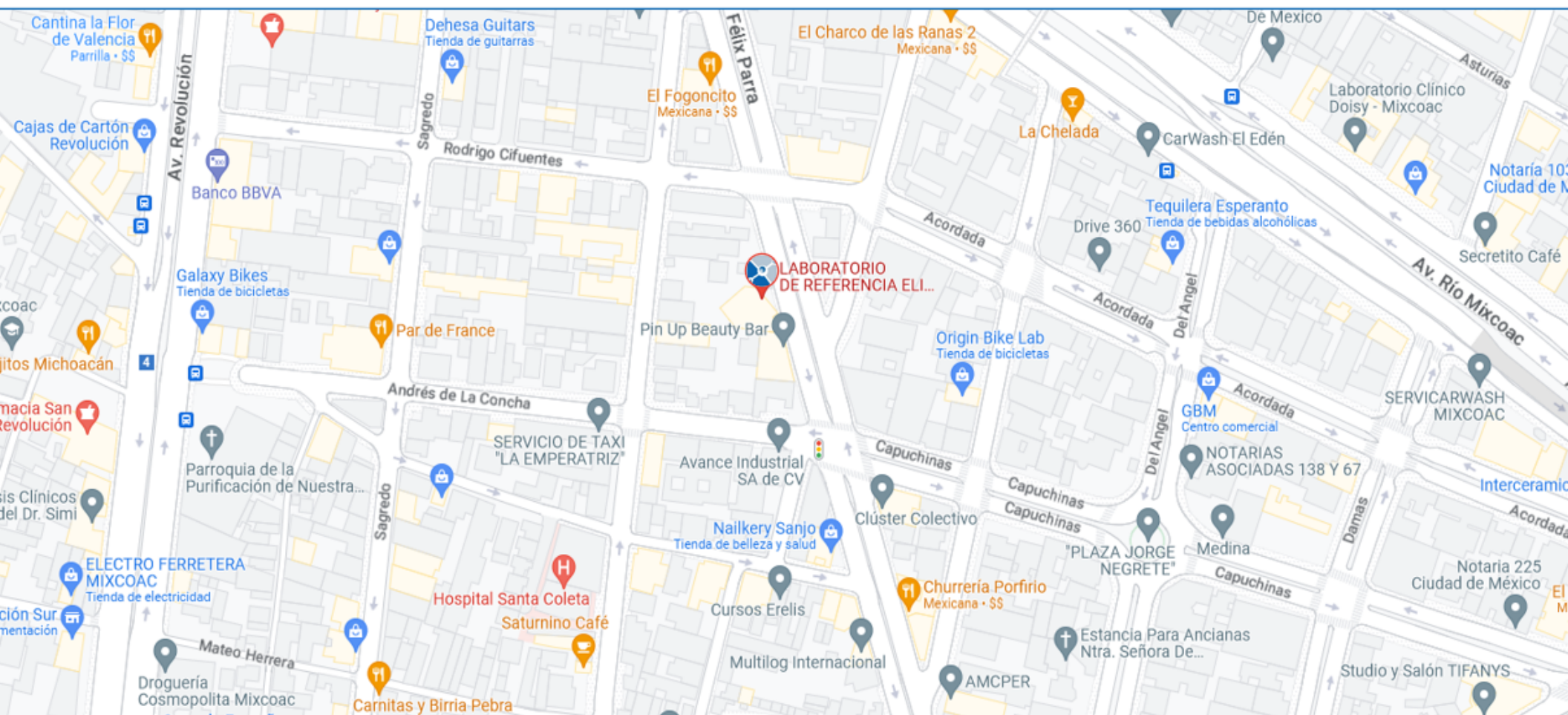

DIRECTORIO



Puede contactarse con nosotros a los teléfonos:
55 24 54 79 01 y 02

Ext.	Área o contacto	Correo electrónico
101	Operadores telefónicos (conmutador)	
102 a 118	Recepción de muestras y solicitud de correcciones, anexos y cancelaciones Solicitud de resultados Asesoría técnica	recepcion.muestras@labelisa.com.mx resultados.urgentes.eli@gmail.com patologia.eli@gmail.com andrea.meza@labelisa.com.mx calidad@labelisa.com.mx
112	Gerencia Operativa Sergio Zepeda Martínez	sergio.zepeda@labelisa.com.mx
307	Gerencia de crédito y cobranza Marcela Acosta Pérez	marcela.acosta@labelisa.com.mx
401	Gerencia de Control de calidad Carmen Montserrat Cisneros de Alba	calidad@labelisa.com.mx
402	Solicitud de recolección de muestras	N/A
501*	Gerencia de Ventas locales (Sur) José Luis Rodríguez Villafuerte	joseluis.rodriguez@labelisa.com.mx
502*	Gerencia de Ventas locales (Norte) Alma Olimpia Mancilla Legorreta	almaolimpia.mancilla@labelisa.com.mx
503*	Gerencia de Ventas foráneas Roberto Francisco Cueva Hernández	roberto.cueva66@gmail.com
504*	Gerencia de Ventas corporativas Carlos Uriel Teodosio Barrón	carlosuriel.teodosio@labelisa.com.mx

*Para solicitar costos o cotizaciones contactar a nuestras gerencias de ventas

CALIDAD Y CONFIANZA EN EL SERVICIO



Como parte de nuestro compromiso de calidad y confianza, cumplimos con el marco regulatorio vigente.

Desde el 2011 tenemos implementado y certificado nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la **ISO 9001-2015**, asegurando la calidad de nuestros procesos en las fases preanalítica, analítica y postanalítica, con el objetivo principal de convertirnos en su mejor opción como laboratorio clínico de referencia.

Participamos en los programas de evaluación externa de la calidad de **Qualitat, PACAL y CDC** para disciplinas como Química clínica, Inmunoquímica, Inmunología, Hematología, Uroanálisis, Parasitología, Bacteriología y Tamiz neonatal*

*Si desea consultar nuestros diplomas favor de solicitarlo con nuestras las gerencias de ventas.



CALIDAD Y CONFIANZA EN EL SERVICIO



Seguridad de la información • Calidad • Ambiente • Inocuidad en los Alimentos • Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo • Seguridad de la información • Calidad • Ambiente • Inocuidad en los Alimentos
Inocuidad en los Alimentos • Seguridad y Salud en el Trabajo • Seguridad de la información • Calidad • Ambiente
Calidad • Ambiente • Inocuidad en los Alimentos • Seguridad y Salud en el Trabajo • Seguridad de la información • Calidad
Seguridad de la información • Calidad • Ambiente • Inocuidad en los Alimentos • Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo • Seguridad de la información • Calidad • Ambiente • Inocuidad en los Alimentos

Registro de Certificación Certificate of Registration

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

LABORATORIO DE REFERENCIA ELI, S.A. DE C.V.

Calle Félix Parra no. 39, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, México.

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s) norma(s):
Has been evaluated by ATR and found in agreement with following standard(s):

NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015)

Alcance: / Scope of registration:

Mensajería, recepción de muestras, captura, validación de resultados, análisis clínicos (Química clínica, Inmunología, Hematología, uroanálisis, inmunoanálisis, parasitología, bacteriología, tamiz neonatal y biología molecular).

El anexo AC 3177 forma parte integral del presente documento

Fecha de Certificación Inicial: 13-07-2011

Número de Certificado: 3177

Fecha de expedición: 12-10-2022

Acreditación No. 34/11 Vigente a partir de 2011/05/13


Óscar M. López Batista
Director General, ATR / President, ATR



Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.
This registration will only be valid according to the expiration dates indicated in the stickers found in the back of this document.

American Trust Register, S.C., empresa ubicada en: Retorno de Toluca 112, Colonia La Florida, C.P. 53160, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a: / In case of clarification about scope of registration or applicability, please contact:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 - 5236 7384

POLÍTICAS SOBRE LA ENTREGA DE RESULTADOS



Laboratorio de Referencia Eli hace un compromiso puntual con usted para cumplir con los tiempos de entrega contenidos en este Catálogo:

- » El tiempo de entrega de sus resultados debe contarse en **días hábiles (Lunes a Viernes)** no contar Sábados, Domingos ni días festivos oficiales).
- » Cuando sus muestras lleguen a nuestras instalaciones debe contarlo como el día cero, valorar el día posterior como el día 1 y así sucesivamente (planifique los tiempos de entrega a sus pacientes).
- » Hay pruebas que se procesan en corridas programadas por día o por semana.
- » La liberación y envío de informes de resultados se realiza de forma continua de **Lunes a Sábado*** para procesos automatizados y de **Lunes a Viernes** para procesos manuales.
- » En la Solicitud de Estudios de Maquila debe marcar la vía por la que desea recibir sus informes, es decir, si requiere el "Original" (impreso) o por "E-mail". Al no elegir una opción, en automático, se enviarán de forma electrónica (mantenga actualizada su información con nuestras gerencias de ventas).
- » Además de ser enviados vía electrónica o de forma impresa, se pone a su disposición el servicio de consulta y descarga vía web (para activar este servicio contactar con nuestras gerencias de ventas).

LÍMITE DE LA CORRESPONSABILIDAD



- » **Laboratorio de Referencia Eli no se hace responsable** de las indicaciones directas al paciente, las prácticas implementadas durante la toma de muestra, las condiciones de almacenaje antes de su recolección y cuando no sean transportadas por nuestros mensajeros.
- » **Laboratorio de Referencia Eli podrá rechazar** los especímenes que no cumplan con el volumen requerido, tipo de contenedor y características solicitadas en este documento.
- » **Laboratorio de Referencia Eli será responsable** del transporte, conservación y proceso de las muestras cuando se realice por nuestro personal y cuando hayan arribado a nuestras instalaciones. En caso de que haya algún evento que comprometa el transporte, proceso y envío de resultados le será informado a la brevedad.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA



- 1 Número de cliente asignado a su laboratorio.
- 2 Nombre de su laboratorio.
- 3 Fecha en la cual envía la Solicitud de Estudios de Maquila.
- 4 Nombre de la persona entrega las muestras a nuestro personal.
- 5 Medio por el cual desea recibir sus resultados: Original (Impreso) o por Email. ("●")
- 6 Nombre completo del paciente: Apellido paterno, Apellido materno y Nombre(s) y/o Folio (identificador)
- 7 Edad y sexo del paciente (Datos demográficos).
- 8 Tipo de muestra enviada. ("●")
- 9 Clave de estudio contenida en la versión vigente de nuestro Catálogo de servicios.
- 10 Nombre, acrónimo o siglas del estudio solicitado.
- 11 Costo del estudio contenida en la versión vigente de nuestro Catálogo de servicios.
- 12 **NO LLENAR** | Espacio exclusivo de Laboratorio de Referencia Eli.
- 13 **NO LLENAR** | Espacio exclusivo que será llenado por los mensajeros al momento de recibir su pago*.
- 14 **NO LLENAR** | Espacio exclusivo de Laboratorio de Referencia Eli.
- 15 Costo total de los estudios solicitados.

Laboratorio de Referencia
ELI, S.A. DE C.V.

Calle Félix Parra No. 39,
Col. San José Insurgentes,
Alcal. Benito Juárez, CDMX
Tels.: (55) 2454 1901, (55) 2454 1902

SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA

No. Cliente: _____ Nombre de Laboratorio: _____ Fecha: _____
Nombre de quien envía: _____ Reporte: ☐ Original ☐ E-mail

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) y/o Folio	Clave	Estudio(s) Solicitado(s)	Precio	Excl. Eli
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T. ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T. ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T. ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T. ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T. ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T. ☐ Otro					

TOTAL POR ESTUDIOS SOLICITADOS \$

NO LLENAR PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE REFERENCIA ELI

Recibí: \$ _____ Por Concepto de: _____ Nombre: _____ Firma: _____
Recepción Eli: Nombre: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____
Capturó: _____ Vo. Bo.: _____ ENVÍO/IMPRESIÓN: _____

IMPORTANTE

- Cualquier omisión o error de los datos solicitados llevará a la retención de sus muestras.
- Si se terminan sus solicitudes, de **forma emergente** puede sacar copias de la página 9.
- Para adquirir un block nuevo de solicitudes consultar la página 23.
- Si desea adquirir nuestra solicitud para llenado electrónico contactar con nuestras gerencias de ventas.



Laboratorio de Referencia **ELI, S.A. DE C.V.**

Calle Félix Parra No. 39,
Col. San José Insurgentes,
Alcal. Benito Juárez, CDMX
Tels.: (55) 2454 7901, (55) 2454 7902

SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA

No. Cliente: _____ Nombre de Laboratorio: _____ Fecha: _____
Nombre de quien envía: _____ Reporte: ☐ Original ☐ E-mail

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) y/o Folio			Clave	Estudio(s) Solicitado(s)	Precio	Excl. Eli
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
TOTAL POR ESTUDIOS SOLICITADOS \$								

NO LLENAR PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE REFERENCIA ELI

Recibí: \$ _____ Por Concepto de: _____ Nombre: _____ Firma: _____
Recepción Eli Nombre: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____
Capturó: _____ Vo.Bo.: _____ ENVIÓ/IMPRIMIÓ: _____



Laboratorio de Referencia **ELI, S.A. DE C.V.**

Calle Félix Parra No. 39,
Col. San José Insurgentes,
Alcal. Benito Juárez, CDMX
Tels.: (55) 2454 7901, (55) 2454 7902

SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA

No. Cliente: _____ Nombre de Laboratorio: _____ Fecha: _____
Nombre de quien envía: _____ Reporte: ☐ Original ☐ E-mail

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) y/o Folio			Clave	Estudio(s) Solicitado(s)	Precio	Excl. Eli
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
Edad	Sexo	Tipo de Muestra ☐	Plasma ☐	Suero ☐	Orina ☐	Sangre T. ☐	Otro ☐	
TOTAL POR ESTUDIOS SOLICITADOS \$								

NO LLENAR PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE REFERENCIA ELI

Recibí: \$ _____ Por Concepto de: _____ Nombre: _____ Firma: _____
Recepción Eli Nombre: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____
Capturó: _____ Vo.Bo.: _____ ENVIÓ/IMPRIMIÓ: _____

	SOLICITUD DE ALERGENOS	CÓDIGO:	VERSIÓN:
		F-OPE-09	00
		SUSTITUYE A:	VERSIÓN:
		N/A	N/A
		OFICIAL.:	VIGENCIA
<i>Laboratorio de Referencia ELI, S.A. DE C.V.</i>		NOV 2022	NOV 2025
Página 1 de 2			

NO. DE CLIENTE	NOMBRE DEL LABORATORIO	NOMBRE DEL PACIENTE

INSTRUCCIONES: Seleccione con "X" el perfil y los alergenicos que requiere

- ☐ 2396 Perfil de alergenicos MASTER - 32 alergenicos
☐ 2174 Perfil de alergenicos 12 dterminaciones
☐ 2324 Perfil de alergenicos 6 determinaciones (alimenticios)
☐ 1646 Perfil de alergenicos 6 determinacioens (inhalatorios)

LISTA DE ALERGENOS

ACAROS ☐ 2303 Acarus siro ☐ 3085 Blomia tropicalis ☐ 2400 Dermatophagoides farinae ☐ 2655 Dermatophagoides microceras ☐ 2399 Dermatophagoides pteronyssinus ☐ 2972 Glycyphagus domesticus ARBOLES ☐ 3078 Abedul blanco ☐ 2734 Alamo ☐ 4240 Arbol de algodón ☐ 2519 Cedro ☐ 2702 Cedro de la montaña ☐ 2735 Encino ☐ 2749 Fresno ☐ 3019 Fresno blanco ☐ 2721 Mezcla de robles ☐ 2576 Nogal ☐ 4165 Olivo ☐ 4277 Palma datilera ☐ 2982 Plama reina ☐ 2953 Pino australiano ☐ 2703 Pino blanco ☐ 2738 Pirul ☐ 2675 Sauce ☐ 2577 Ligustrum sp. (trueno) HONGOS ☐ 2584 Alternaria ☐ 2867 Alternaria tenuis ☐ 2364 Aspergillus ☐ 2868 Aspergillus clavatus ☐ 2869 Aspergillus flavus ☐ 2825 Aspergillus fumigatus ☐ 2870 Aspergillus nidulans ☐ 2871 Aspergillus oryzae ☐ 2872 Aspergillus terreus	HONGOS (CONT.) ☐ 2662 Candida albicans ☐ 4298 Cephalosporium acremonium ☐ 2873 Chaetomium globosum ☐ 2661 Cladosporium herbarum ☐ 2874 Curvularia lunata ☐ 3086 Epicoccum ☐ 4154 Epicoccum purpurascens ☐ 3208 Esporas ☐ 2875 Fusarium uniforme ☐ 2580 Helmithosporium sp ☐ 2639 Mucor racemosus ☐ 2530 Penicillium brevicompactum ☐ 2876 Penicillium notatum ☐ 2877 Phoma betae ☐ 2878 Pityrosporum orbiculare ☐ 3040 Rhizopus nigricans ☐ 2879 Trichoderma viride ☐ 2881 Trichophyton ☐ 2880 Trichosporon pullulans ☐ 2882 Ulocidium chatarum INSECTOS ☐ 2559 Avispa amarilla ☐ 2560 Avispa cara blanca ☐ 2561 Avispa europea ☐ 2562 Avispa papelera ☐ 2646 Avispon ☐ 2680 Chinche ☐ 2640 Cucaracha alemana ☐ 2529 Cucaracha americana ☐ 2647 Hormiga roja ☐ 2563 Mosquito ☐ 2973 Polilla PARASITOS ☐ 2952 Anisakis ☐ 2951 Ascaris	ANIMALES ☐ 2747 Caspa de caballo ☐ 2517 Caspa de perro ☐ 2960 Caspa de vaca ☐ 4176 Epitelio de cabra ☐ 3141 Epitelio de cerdo ☐ 4250 Epitelio de cobayo ☐ 3142 Epitelio de conejo ☐ 2403 Epitelio de gato ☐ 3143 Epitelio de oveja ☐ 2862 Epitelio de rata ☐ 3053 Epitelio de ratón ☐ 4185 Epitelio de hamster ☐ 2305 Epitelio de perro ☐ 2716 Excremento de paloma ☐ 3087 Gato ☐ 2717 Orina de rata ☐ 4145 Orina de ratón ☐ 2741 Pata de gallo ☐ 3088 Perro ☐ 2801 Plumas de canario ☐ 2656 Plumas de ganso ☐ 4153 Plumas de loro ☐ 2718 Plumas de pato ☐ 2802 Plumas de pavo ☐ 2657 Plumas de periquito ☐ 2658 Plumas de pollo ☐ 2681 Rata ☐ 2719 Ratón POLVOS ☐ 2304 Casero allergopharma ☐ 2589 Casero Bencard ☐ 2660 Casero Greer ☐ 2582 Casero Hollister-Stier ☐ 2795 Casero japonés	PLANTAS Y HIERBAS ☐ 2748 Acacia ☐ 2742 Agrotis alba ☐ 2578 Amaranthus hybridus ☐ 2307 Ambrosia ☐ 2583 Artemisa ☐ 3082 Atriplex confertifolia ☐ 2579 Atriplex canescens ☐ 4225 Ceñoño ☐ 2722 Diente de león ☐ 2733 Eucalipto ☐ 3083 Franseria acanthicarpa ☐ 4237 Hierba cola de cordero ☐ 3001 Hierba común ☐ 2750 Hierba falsa ☐ 3081 Hierba timotea ☐ 3020 Hierba trepadora ☐ 2786 Manzanilla ☐ 2793 Mezquite ☐ 2744 Cardo ruso ☐ 2739 Plantago ☐ 2740 Sorghum spp. ☐ 4227 Sorgo ☐ 2362 Trigo ☐ 4149 Trigo sarraceno ☐ 4226 Polen de avena ☐ 2306 Polen rape ☐ 2533 Vara dorada VENENOS ☐ 2698 De avispa amarilla ☐ 2649 De avispa café ☐ 2648 De avispa papelera ☐ 2574 De abeja MISCELANEOS ☐ 4239 Enterotoxina A	PASTOS ☐ 2720 Avena ☐ 4103 Azul ☐ 2792 Bahia ☐ 3080 Ballico ☐ 2585 Bermuda ☐ 4175 Bromo ☐ 2885 Canario ☐ 2886 Centeno ☐ 2518 Común ☐ 4247 De carrizal ☐ 4249 De centeno silvestre ☐ 2890 De huerta ☐ 4248 De pradera ☐ 2891 Invernal ☐ 2586 Johnson ☐ 2826 Perenne ☐ 2887 Silvestre ☐ 2892 Terciopelo ☐ 2587 Timothy ☐ 2773 Trigo MEDICAMENTOS ☐ 2556 Amoxicilina ☐ 2557 Ampicilina ☐ 148 Penicilina G ☐ 2454 Penicilina V OCUPACIONALES ☐ 2442 Algodón ☐ 2676 Bromo ☐ 2692 Celulosa ☐ 4278 Isocinato HDI ☐ 2453 Lana ☐ 2630 Latex ☐ 2693 Polipropileno ☐ 2865 Seda
--	---	---	--	--



SOLICITUD DE ALERGENOS

Laboratorio de Referencia ELI, S.A. DE C.V.

CÓDIGO:	VERSIÓN:
F-OPE-09	00
SUSTITUYE A:	VERSIÓN:
N/A	N/A
OFICIAL.:	VIGENCIA
NOV 2022	NOV 2025

Página 2 de 2

LISTA DE ALERGENOS (CONT.)

ALIMENTOS

2566 Aguacate	2808 Ciruela	2745 Mezcla embutidos
2992 Ajo	2697 Clara de huevo	2723 Mezcla hierbas
2974 Ajonjolí	3027 Coco	2666 Mezcla mariscos
2531 Albahaca	4328 Col	2785 Miel de abeja
2590 Alfa-lactoalbumina	2694 Coliflor	2645 Mora azul
2669 Almeja	4115 Te	4269 Mostaza
2483 Almendra	2588 Durazno	2342 Naranja
3193 Alpiste	2504 Ejote	2343 Nuez
3176 Alubia (Frijol blanco)	2736 Epazote	2984 Nuez de Brasil
2803 Amaranto	2371 Fresa	3046 Nuez de Castilla
2863 Anís	4140 Frijol de soya	3047 Nuez Pecana
2730 Apio	2411 Frijol pinto	2308 Oregano
2848 Arandano	2732 Frijol rojo	2632 Ostión
2571 Arroz	2652 Garbanzo	2810 Ovoalbumina
2386 Atun	2581 Girasol	2392 Papa
2570 Avellana	2423 Gluten	2631 Papaya
2633 Avena	2909 Higo	2787 Pepino
2864 Bacalao	3025 huachinango	2664 Pera
3026 Berenjena	2311 Huevo	2794 Perejil
2591 Beta-lactoalbumina	2394 Jamón	2370 Pescado
2568 Brocoli	2653 Jengibre	2667 Pimienta negra
2413 Cacahuat	2391 Jitomate	4268 Pimiento rojo
2731 Cacao	2678 Kiwi	3161 Pimiento verde
2848 Café	3479 Langosta	2567 Piña
2668 Calabaza	2982 Leche de cabra	4186 Pistache
2313 Camaron	2799 Leche de soya	2449 Platano
2670 Cangrejo	2310 Leche de vaca	2704 Pulpo
2480 Caña de azúcar	2983 Leche hervida	2312 Queso cheddar
3029 Carne de carnero (cordero)	2695 Lechuga	2809 Queso tipo mohoso
2309 Carne de cerdo	3084 Lengua de vaca	2575 Salmon
2487 Carne de pavo	2651 Lenteja	2788 Sandía
2318 Carne de pollo	2481 Levadura	2417 Sardina
2319 Carne de res	3030 Levadura de cerveza	2384 Soya
2725 Caseína	2346 Limón	2573 Tomate
2789 Cebada	2975 Macarela	2569 Toronja
2385 Cebolla	2393 Maíz cultivado	2978 Trucha
3136 Cecina	4148 Malta	2691 Uva
4134 Centeno	3028 Mamey	2696 Vainilla
3190 Cereza	2572 Mango	2659 Yema de huevo
2314 Champiñón	2402 Manzana	2715 Yogurt
2746 Chayote	2345 Melón	2390 Zanahoria
2503 Chicharo	2398 Mezcla Col, coliflor y brocoli	
2347 Chocolate	2401 Mezcla limón, lima y naranja	

IMPORTANTE

Este cuestionario **debe** ser llenado en su totalidad, de forma legible y entregado (completo) junto con la muestra del paciente y la solicitud de estudios de maquila. Este documento **no es para** solicitar alérgenos de forma individual. En caso de incumplimiento, la muestra será retenida sin proceso.

	CUESTIONARIO PARA ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO (BIOPSIA, BAAF O CITOLOGÍA)		CÓDIGO:	VERSIÓN:
			F-OPÉ-05	00
			SUSTITUYE A:	VERSIÓN:
	<i>Laboratorio de Referencia ELI, S.A. DE C.V.</i>		N/A	N/A
			OFICIAL.:	VIGENCIA
		NOV 2022	NOV 2025	

FECHA DE LA TOMA	FECHA DE ENVÍO	FECHA DE RECEPCIÓN ELI	FOLIO
DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA EXCLUSIVO ELI	EXCLUSIVO ELI

NO. CLIENTE	NOMBRE DEL LABORATORIO	MEDICO TRATANTE

NOMBRE DEL PACIENTE	

SEXO: ☐ MASC. ☐ FEM. EDAD: _____ años

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO	DATOS CLÍNICOS

DATOS DEL ESPECÍMEN	
SITIO ANATÓMICO	MEDIDAS
DESCRIPCIÓN	

INFORMACIÓN ADICIONAL

IMPORTANTE

Este cuestionario debe ser llenado en su totalidad, de forma legible y entregado junto con la muestra del paciente y la solicitud de estudios de maquila. En caso de incumplimiento, la muestra será retenida sin proceso.

Calle Félix Parra No. 39, Col. San José Insurgentes, Alcal. Benito Juárez, CDMX Tels.: (55) 2454 7901, (55) 2454 7902

	CUESTIONARIO PARA MARCADOR GESTACIONAL EN SUERO		CÓDIGO:	VERSIÓN:
			F-OPe-06	00
			SUSTITUYE A:	VERSIÓN:
			N/A	N/A
Laboratorio de Referencia <i>ELI, S.A. DE C.V.</i>		OFICIAL.:	VIGENCIA	
		NOV 2022	NOV 2025	

FECHA Y HORA DE LA TOMA	FECHA DE ENVÍO	FECHA DE RECEPCIÓN ELI	FOLIO
DD / MM / AAAA HH:MM	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA EXCLUSIVO ELI	EXCLUSIVO ELI

NO. CLIENTE	NOMBRE DEL LABORATORIO	MEDICO TRATANTE

NOMBRE DE LA PACIENTE	

FECHA DE NACIMIENTO	FUR	EDAD GESTACIONAL	
		POR FUR	POR USG
DD / MM / AAAA	DD / MM		

PESO: _____ Kg ESTATURA: _____ cm

RAZA:

	LATINA
	NEGRA
	CAUCÁSICA
	OTRA: _____

GESTACIONES: _____

PARTOS: _____

CESÁREAS: _____

ABORTOS: _____

GESTACIÓN MÚLTIPLE	☐	Sí	☐	No	☐	Doble	☐	Triple	☐	Otro _____
	TABAQUISMO	☐	Sí	☐	No	☐	Tipo I	☐	Tipo II	
	DIABETES MELLITUS	☐	Sí	☐	No	Especificar: _____				
	MEDICAMENTOS	☐	Sí	☐	No	Especificar: _____				
MARCADORES BIOQUÍMICOS ANORMALES PREVIOS	☐	Sí	☐	No	Especificar: _____					
USG ANORMAL	☐	Sí	☐	No	Especificar: _____					
HIJO PREVIO CON CROMOSOMOPATÍA	☐	Sí	☐	No	Especificar: _____					

ESTUDIO SOLICITADO	
☐ DUO MARCADOR (SEMANA 9 a 13)	SEMANA _____
☐ TRIPLE CUADRUPLÉ MARCADOR (SEMANA 15 A 22)	SEMANA _____

IMPORTANTE

Este cuestionario debe ser llenado en su totalidad, de forma legible y entregado junto con la muestra del paciente, la solicitud de estudios de maquila y el USG. En caso de incumplimiento, la muestra será retenida sin proceso.

	CUESTIONARIO PARA CARIOTIPO		CÓDIGO:	VERSION:
			F-OPE-07	00
			SUSTITUYE A:	VERSION:
			N/A	N/A
	Laboratorio de Referencia <i>ELI, S.A. DE C.V.</i>		OFICIAL.:	VIGENCIA
		NOV 2022	NOV 2025	

FECHA Y HORAS DE LA TOMA	FECHA DE ENVÍO	FECHA DE RECEPCIÓN ELI	FOLIO
DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA	EXCLUSIVO ELI

NO. CLIENTE	NOMBRE DEL LABORATORIO	MEDICO TRATANTE

NOMBRE DEL PACIENTE	

SEXO: ☐ MASC. ☐ FEM. EDAD: _____ años

¿El paciente ha sido tratado con; anabólicos, quimioterapia o radioterapia? ☐ Sí ☐ No

¿El paciente ha recibido transfusiones sanguíneas o trasplantes de médula? ☐ Sí ☐ No

¿Cuándo? _____

¿El paciente tiene antecedentes familiares de anomalías genéticas? ☐ Sí ☐ No

¿Cuáles? _____

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO	DATOS CLÍNICOS

DATOS DEL ESPECÍMEN
ANTICOAGULANTE UTILIZADO:
VOLUMEN DE LA MUESTRA (mL):

INFORMACIÓN ADICIONAL

IMPORTANTE

Este cuestionario debe ser llenado en su totalidad, de forma legible y entregado junto con la muestra del paciente y la solicitud de estudios de maquila. En caso de incumplimiento, la muestra será retenida sin proceso.

	CUESTIONARIO PARA FENOTIPO INMUNOLÓGICO		CÓDIGO:	VERSIÓN:
			F-OPE-08	00
			SUSTITUYE A:	VERSIÓN:
			N/A	N/A
	<i>Laboratorio de Referencia ELI, S.A. DE C.V.</i>		OFICIAL...:	VIGENCIA
NOV 2022			NOV 2025	

FECHA Y HORA DE LA TOMA	FECHA DE ENVÍO	FECHA DE RECEPCIÓN ELI	FOLIO
DD / MM / AAAA	HH:MM	DD / MM / AAAA	EXCLUSIVO ELI

NO. CLIENTE	NOMBRE DEL LABORATORIO	MEDICO TRATANTE

NOMBRE DEL PACIENTE	

SEXO: ☐ MASC. ☐ FEM. EDAD: _____ años

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO	DATOS CLÍNICOS

DATOS DEL ESPECÍMEN
ANTICOAGULANTE UTILIZADO:
VOLUMEN DE LA MUESTRA (mL):

INFORMACIÓN ADICIONAL

IMPORTANTE

Este cuestionario debe ser llenado en su totalidad, de forma legible y entregado junto con la muestra del paciente y la solicitud de estudios de maquila. En caso de incumplimiento, la muestra será retenida sin proceso.

CRITERIOS GENERALES DE ACEPTACIÓN DE MUESTRAS



MUESTRA	DESCRIPCIÓN	
Suero	Tubo tapón dorado o amarillo (con gel separador) o tubo tapón rojo (sin aditivos). Centrifugar, separar en tubo de trasvase y refrigerar hasta su recolección.	
Plasma EDTA	Tubo tapón lila (con EDTA) hasta la marca de aforo y homogeneizar inmediatamente por inversión suave (10 veces). Centrifugar, separar en tubo de trasvase y congelar hasta su recolección	
Plasma citrato	Tubo tapón azul claro (con Citrato de sodio al 3.8%) hasta la marca de aforo y homogeneizar inmediatamente por inversión suave (10 veces). Centrifugar, separar en tubo de trasvase y congelar hasta su recolección	
Sangre Total EDTA	Tubo tapón lila (con EDTA) hasta la marca de aforo y homogeneizar inmediatamente por inversión suave (10 veces). NO CENTRIFUGAR, no trasvasar y refrigerar hasta su recolección	
Orina ocasional	Orina reciente en recipiente / frasco de plástico estéril con tapa de rosca, sin aditivos e identificado con los datos del paciente.	
Orina de 24 horas	Alícuota en recipiente / frasco de plástico estéril con tapa de rosca, sin aditivos, identificados con los datos del paciente. (Enviar nota del volumen total en 24 horas en la etiqueta o en la solicitud de estudios)	
Muestras de heces	Del tamaño de una nuez en recipiente / frasco de plástico estéril con tapa de rosca, sin aditivos e identificado con los datos del paciente. Para muestras seriadas identificar cada contenedor con el número de día en que fue tomada.	
Frotis para Papanicolau o líquidos orgánicos	Laminillas identificadas, fijar con citospray o alcohol de 96° para optimizar la calidad de la muestra. Colocar identificador del paciente o sitio anatómico en la laminilla. Enviar en carterilla con los datos solicitados o protegidos de impactos durante el transporte.	
Biopsias	En recipiente de plástico con cerrado hermético (el tamaño depende del tamaño de la pieza), con formol al 10% e identificado con los datos del paciente.	

TOMA DE MUESTRAS POR VENOPUNCIÓN



1. La recolección adecuada, así como las técnicas de obtención y de manejo de muestras, son esenciales para producir resultados de calidad en el laboratorio clínico.
2. Es de suma importancia que nuestros clientes provean las instrucciones adecuadas a sus pacientes como son: restricciones sobre la dieta antes de la toma de muestra, tiempo de ayuno o la posible suspensión de uno o más medicamentos (siempre que el médico tratante lo autorice).
3. Se sugiere que el cliente tenga instrucciones para las actividades de toma de muestra primaria de sangre así como especificar las características aceptables para recipientes y aditivos.
4. A continuación compartimos con usted el orden recomendado por CLSI para realizar las tomas de muestra:

Tapón	Contenido de tubo	Área de uso	Inversiones
	Hemocultivo	Microbiología	5 veces
	Citrato de sodio	Coagulación (Tiempos de coagulación fibrinógeno, agregación plaquetaria)	3 a 4 veces
	Gel separador	Química clínica	5 veces
	Sin anticoagulante, con activador de coagulación, con silicón	Química clínica, banco de sangre serología	8 a 10 veces
	Gel separador y trombina	Obtención de suero rápido	5 a 6 veces
	Gel separador y heparina de litio	Química clínica en plasma	5 veces
	Heparina de sodio/litio	Química clínica (urgencias) hematología (fragilidad osmótica)	8 a 10 veces
	EDTA K ₂	Hematología, banco de sangre	8 a 10 veces
	Gel separador y EDTA K ₂	Determinaciones de carga viral	8 a 10 veces
	Oxalato de Potasio/NaF	Química clínica, pruebas de lactato y glucosa	8 veces

TOMA DE MUESTRAS POR VENOPUNCIÓN



1



Tenga preparado el material necesario para la toma de muestra y verifique que el paciente cumple con los requisitos para llevar a cabo la toma de muestra.

2




Coloque al paciente en una posición en la que se encuentre cómodo y se tenga acceso a las venas. Verifique que la identificación en los contenedores es la correcta y siga el orden sugerido para la toma.

3



Desinfecte el área, coloque la ligadura y realice la palpación de la vena disponible para venopunción.

4

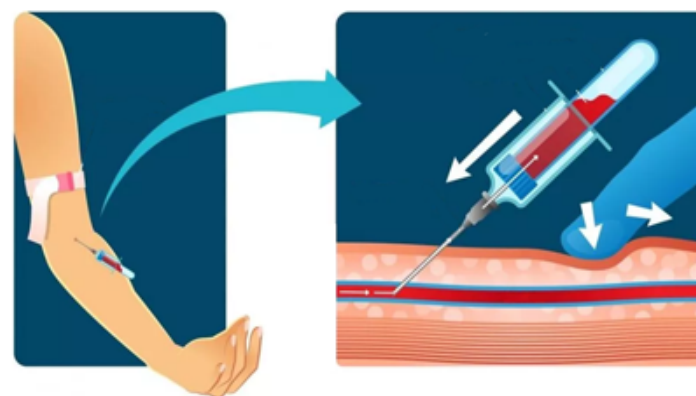


Realice la punción y asegure que la aguja penetra en un ángulo aproximado de 15° y con el bisel hacia arriba y llene los tubos hasta la capacidad recomendada.

TOMA DE MUESTRAS POR VENOPUNCIÓN



5

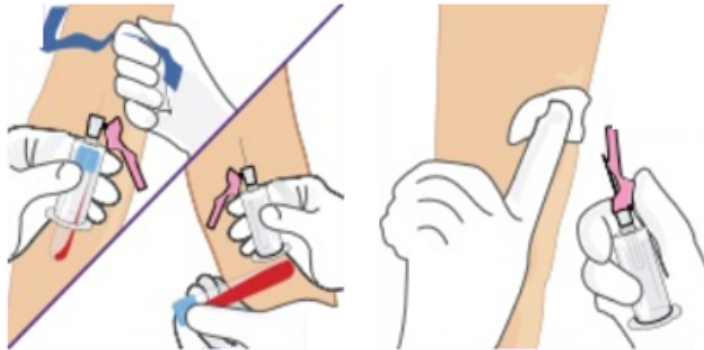


Una vez que los tubos se ha obtenido la muestra, retire la aguja y coloque una torunda o un pad estéril sobre el punto de punción.

6



La aguja debe ser desechada en el contenedor para RPBI que marca la NOM-087-ECOL-SSA1-2022.


7

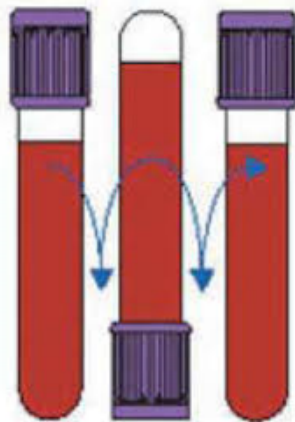

En el caso de los tubos con aditivo, la sangre debe mezclarse con el anticoagulante por inversión suave de 8 a 10 veces.

8

TIPO DE MUESTRA	VELOCIDAD (rpm)	TIEMPO (min)
SUERO	4000	15
PLASMA	3500	10

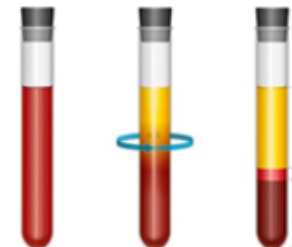

Cuando se requiera suero o plasma, se debe separar el paquete eritrocitario mediante centrifugación y transferir en un tubo de plástico estéril correctamente identificado.

TOMA DE MUESTRAS PARA EL TAMIZ NEONATAL



ANTES DE LA TOMA DE MUESTRA: Caliente la zona de la punción por fricción, empleando una manta previamente calentada a no más de 37°C.

ADVERTENCIA

Le recordamos que los resultados del tamiz sólo serán confiables cuando la muestra se tome **antes** de que el neonato cumpla **1 mes de edad**.

1. Ubique la zona de la punción en el talón del bebé (zona sombreada) y limpie con una torunda humedecida con alcohol etílico (que no esté empapada) y secar con otra torunda seca. **NO USAR YODO.**
2. Realizar la punción con una lanceta estéril especial para este tipo de tomas que tenga una punta no mayor a 2.0 mm y únicamente en el área sombreada (recomendaciones de Blumenfeld). Mantenga la lanceta al menos 3 segundos sobre el área de punción y retire.
3. Sostenga firmemente el pie, espere a que se forme la primera gota y elimine con una torunda seca o papel absorbente.
4. La siguiente gota debe ser lo suficientemente grande para llenar el círculo completo del lado impreso de la Tarjeta Guthrie (papel filtro Whatman 903).
5. Solo se debe aplicar **UNO GOTA EN CADA CÍRCULO** y es necesario llenar todos los círculos.

TOMA DE MUESTRAS PARA EL TAMIZ NEONATAL



- » La tarjeta se debe secar al aire, a temperatura ambiente y protegida de la luz directa.
- » No se deben apilar las tarjetas mientras se secan.
- » No utilizar capilares ni agujas para llenar los círculos impresos en la tarjeta.
- » La piel del talón nunca debe tocar directamente la tarjeta.
- » La tarjeta debe venir correctamente identificada con el nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha de toma y sexo. Además de protegida en un sobre o carterilla.


MUESTRAS NO VÁLIDAS

La cantidad de la muestra es insuficiente para la prueba	La muestra aparenta estar rayada ó desgastada	La muestra aparenta estar diluida ó desteñida	La muestra aparente tener coagulos ó capas sucesivas
La muestra no se había secado antes del envío	La muestra aparenta estar sobresaturada	La muestra exhibe anillos de suero	No hay Sangre

CRITERIOS GENERALES DE RECHAZO DE MUESTRAS



CRITERIO	DESCRIPCIÓN
Identificación	Muestra sin identificación
	Muestra con identificación ilegible
	La identificación de la muestra no coincide con la Solicitud de estudios de maquila
Derrames	El contenedor de la muestra presenta derrame de la misma en el exterior. Muestra completamente derramada.
Insuficiente	La muestra no cumple con el volumen o la cantidad solicitada en este catálogo El aforo de la muestra no es el adecuado.
Contenedor	Muestra en contenedor inadecuado, no solicitado en este catálogo o de vidrio.
	Contenedor roto o laminilla rota.
	Jeringa con aguja o con émbolo sin fijar.
Aditivos	Muestra con aditivos no solicitados en este catálogo.
	Muestras con medios o aditivos caseros.
	Muestra sin el aditivo solicitado en este catálogo.
Hemólisis	Mayor o igual a (+++)
Lipemia	Mayor o igual a (+++)
Ictericia	Mayor o igual a (+++)

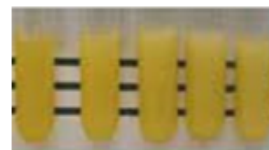

SOLICITUD DE MATERIAL PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS



- » Le recordamos que la solicitud de material para la toma y envío de muestras se debe realizar de forma electrónica, enviando el formato vigente al correo electrónico rosa.acosta@labelisa.com.mx , con un compromiso de entrega antes de 3 días hábiles.
- » Si usted no cuenta con su solicitud de material puede solicitarla a través de nuestras gerencias de ventas (ver Directorio en la página 3).
- » No se podrán surtir solicitudes hechas a mano o por vía telefónica, gracias por su comprensión.

Laboratorio de Referencia
ELI, S.A. DE C.V.

Calle José del Castillo No. 3 Altos Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez, México DF
s. 01(55) 24 54 79 01, 01(55) 24 54 79 02
Lada sin costo 01800 1616122

SOLICITUD DE MATERIAL

No. Cliente: Nombre de Laboratorio: Fecha:
Nombre quien envía:

Clave	Descripción	Cantidad	Notas
1	Tubo blanco	50	Enviar tapones suficientes

EJEMPLO DE SOLICITUD ELECTRÓNICA

NO LLENAR. PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE REFERENCIA ELI

Autoriza solicitud: Orden no.
Suministra material: Fecha estimada de entrega:
Mensajero asignado:

ASESORÍA TÉCNICA, QUEJAS Y SUGERENCIAS



1. El personal de Laboratorio de Referencia Eli le proveerá asesoría sobre la elección de los exámenes, uso de servicios, casos clínicos particulares, juicios profesionales sobre la interpretación de resultados, utilización efectiva de los servicios y consultoría científica sobre las pruebas ofertadas (ver el Directorio en la página 3)
2. Si usted tiene alguna queja* o sugerencia recuerde que nuestro Sistema de Gestión de la Calidad implementa procedimientos para documentar, dar seguimiento y atención oportuna a estas. Favor de acceder a este [link](#), enviar un correo electrónico a calidad@labelisa.com.mx / calidad2@labelisa.com.mx o comunicarse con cualquiera de nuestras gerencias de ventas.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE MICROBIOLOGÍA (Bacterias y Hongos)

CLAVE	NOMBRE DE LA PRUEBA	VOLUMEN REQUERIDO, TIPO DE MUESTRA Y CONSERVACIÓN	CRITERIO(S) DE RECHAZO	TIEMPO (DH)	COMENTARIOS
345	Cultivo para búsqueda de Anaeróbios	Medio de hemocultivo para anaerobios o jeringa sin burbujas con émbolo fijo y sellada.	Contenedores no solicitados con aditivos, muestras en medios de transporte o frascos no aptos para anaerobios.	7 días	Si se emite preliminar a solicitud del cliente, a partir de las 48 hrs.
346	Cultivo de alimentos	100g del alimento en frasco estéril con tapa de rosca o bolsa de cerrado hermético.	Contenedores no solicitados o con aditivos, muestra derramada o insuficiente.	7 días	No se emite preliminar.
347	Cultivo bacteriológico de uñas (no micológico)	Uña afectada o raspado (que no sea superficial) en frasco estéril, seco y con tapa de rosca o en sobre de papel cerrado.	Contenedores no solicitados o con aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
348	Cultivo de expectoración	Flema o expectoración en frasco estéril con tapa de rosca	Muestra de saliva o vómito en un contenedor diferente al solicitado.	3 días	No se emite preliminar.
349	Cultivo de superficies inertes	Hisopado en medio de transporte Stuart.	Muestra tomada con hisopo con soporte de madera, seco o en medio casero.	7 días	No se emite preliminar.
351	Cultivo de exudado oftálmico	Exudado oftálmico en medio de transporte Stuart	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.
352	Cultivo de exudado nasal	Exudado nasal en medio de transporte Stuart	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.
353	Cultivo de exudado faríngeo	Exudado faríngeo en medio de transporte Stuart	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No requiere laminilla para tinción Gram. No se emite preliminar.
354	Cultivo de exudado uretral	Exudado uretral en medio de transporte Stuart o AMIES/carbón activado y Laminilla para tinción Gram.	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.
355	Cultivo de exudado vaginal	Exudado vaginal (no vulvar) en medio de transporte Stuart o AMIES/carbón activado, Laminilla para tinción Gram y examen en fresco con 1mL de solución salina estéril sin hisopo.	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco, en medio casero o con otros aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
356	Cultivo de heces (coprocultivo)	2g de materia fecal en frasco estéril con tapa de rosca o hisopado en medio de transporte Stuart	Pañal con muestra, contenedores no adecuados o muestra excesiva. Hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE MICROBIOLOGÍA (Bacterias y Hongos)

CLAVE	NOMBRE DE LA PRUEBA	VOLÚMEN REQUERIDO, TIPO DE MUESTRA Y CONSERVACIÓN	CRITERIO(S) DE RECHAZO	TIEMPO (DH)	COMENTARIOS
357	Cultivo de exudado vulvar	Exudado vulvar (no vaginal) en medio de transporte Stuart o AMIES/carbón activado, Laminilla para tinción Gram y examen en fresco con 1mL de solución salina estéril sin hisopo.	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco, en medio casero o con otros aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
358	Cultivo de exudado nasofaríngeo	Exudado nasofaríngeo en medio de transporte Stuart	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.
360	Cultivo de líquidos corporales	5mL del líquido corporal en frasco estéril con tapa de rosca o jeringa con émbolo fijo y sellada o tubo estéril sin aditivos.	Contenedores no adecuados, muestra derramada o bolsa de plástico.	3 días	No se emite preliminar.
367	Cultivo de orina (Urocultivo)	10mL de muestra de orina en frasco estéril con tapa de rosca, en tubo con ácido bórico.	Muestras derramadas, en bolsa recolectora, volumen insuficiente o contenedor no solicitado	3 días	Si también solicita Examen General de Orina enviar muestras separadas. No se emite preliminar.
368	Cultivo de punta de catéter	5cm de la punta del catéter en frasco estéril con tapa de rosca.	Piezas del catéter que no es "la punta", longitud de la punta mayor al solicitado, contenedores no solicitados o con aditivos.	3 días	Favor de considerar que longitud es importante para realizar correctamente la técnica de Maki. No se emite preliminar.
370	Cultivo de secreción	Líquido de secreción en frasco estéril con tapa de rosca o tubo estéril y Laminilla para tinción Gram.	Contenedores no adecuados o con aditivos. Hisopado de la herida en medios de transporte.	3 días	No se emite preliminar.
371	Cultivo de exudado ótico	Exudado ótico en medio de transporte Stuart o jeringa con secreción y Laminilla para tinción Gram.	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero. Muestra derramada (jeringa).	3 días	No se emite preliminar.
373	Cultivo de semen (Espermocultivo)	Muestra de semen en frasco estéril con tapa de rosca.	Contenedor no adecuado o con aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
374	Cultivo de Vibrio cholerae	5g de heces en frasco estéril con tapa de rosca.	Pañal con muestra, contenedores no adecuados o muestra excesiva.	5 días	No se emite preliminar.
375	Cultivo de superficies vivas	Hisopado en medio de transporte Stuart.	Muestra tomada con hisopo con soporte de madera, seco o en medio casero.	7 días	No se emite preliminar.
376	Cultivo micológico (Hongos no levaduras)	Material biológico como: limadura de uña, escaras, raspados o cuero cabelludo en frasco estéril con tapa de rosca.	Contenedores no solicitados o con aditivos.	21 días	No sirve para cultivo de levadura. Si se emite preliminar a solicitud del cliente

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE MICROBIOLOGÍA (Bacterias y Hongos)

CLAVE	NOMBRE DE LA PRUEBA	VOLÚMEN REQUERIDO, TIPO DE MUESTRA Y CONSERVACIÓN	CRITERIO(S) DE RECHAZO	TIEMPO (DH)	COMENTARIOS
401	Cultivo de Mycoplasma hominis	Citobrush (cepillado) o hisopado con dacrón, rayón o alginato en frasco o tubo estéril sin aditivos o en medio de transporte para Mycoplasma y Ureaplasma (solicitar a Laboratorio ELI). Mantener a temperatura ambiente.	Muestra en medios de transporte no solicitados, con aditivos o caseros.	3 días	No se emite preliminar. Si la muestra es orina debe ser el primer chorro de la mañana.
403	Cultivo balanoprepucial	Hisopado de la zona balanoprepucial en medio de transporte Stuart y laminilla para tinción Gram.	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.
406	Cultivo de Ureaplasma urealyticum	Citobrush (cepillado) o hisopado con dacrón, rayón o alginato en frasco o tubo estéril sin aditivos o en medio de transporte para Mycoplasma y Ureaplasma (solicitar a Laboratorio ELI). Mantener a temperatura ambiente.	Muestra en medios de transporte no solicitados o con aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
407	Cepa para Identificación y antibiograma	Cepa pura y aislada en agar nutritivo o enriquecido, en caja petri de plástico sellada.	Cepas en medios selectivos o diferenciales, con más de 3 días de siembra	5 días	No se emite preliminar.
521	Cultivo de ____	Material biológico en contenedor estéril y cerrado.	Muestra tomada con hisopos con soporte de madera, en seco, en medio casero o con aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
523	Cultivo de Mycobacterium tuberculosis	Expectoración, aspiración bronquial, orina o LCR en un frasco estéril con tapa de rosca contenido en una bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	42 días	Si se emite preliminar a solicitud del cliente.
617	Baciloscopía 4 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco estéril con tapa de rosca contenido en bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	1 día	Numerar las muestras en la tapa del contenedor o en la etiqueta. No se emite preliminar.
618	Baciloscopía 1 muestra	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco estéril con tapa de rosca contenido en bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	1 día	No se emite preliminar.
619	Baciloscopía 2 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco estéril con tapa de rosca contenido en bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	1 día	Numerar las muestras en la tapa del contenedor o en la etiqueta. No se emite preliminar.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE MICROBIOLOGÍA (Bacterias y Hongos)

CLAVE	NOMBRE DE LA PRUEBA	VOLUMEN REQUERIDO, TIPO DE MUESTRA Y CONSERVACIÓN	CRITERIO(S) DE RECHAZO	TIEMPO (DH)	COMENTARIOS
620	Baciloscopía 3 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco estéril con tapa de rosca contenido en bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	1 día	Numerar las muestras en la tapa del contenedor o en la etiqueta. No se emite preliminar.
622	Baciloscopía en serie de 5 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco estéril con tapa de rosca contenido en bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	1 día	Numerar las muestras en la tapa del contenedor o en la etiqueta. No se emite preliminar.
1396	Antígeno de Chlamydia trachomatis	Cepillado o hisopado uretral o vaginal en tubo limpio y seco.	Contenedores no solicitados y/o con aditivos.	1 día	No se emite preliminar.
1531	Hemocultivo	Sangre total en contenedor especial especificando el día y sitio de la toma.	Contenedores no solicitados y/o con aditivos.	7 días	Si se emite preliminar a solicitud del cliente, a partir de las 48 hrs.
1532	Análisis Bacteriológico de Agua	100mL de agua en contenedor de plástico limpio y con tapa de rosca.	Contenedores no solicitados y/o con aditivos.	7 días	No se emite preliminar.
1986	Búsqueda Rápida de Hongos y Levaduras (KOH)	Limadura de uña, escaras, raspados o cuero cabelludo en frasco estéril con tapa de rosca.	Contenedores no solicitados o con aditivos.	1 día	No se emite preliminar.
2094	Baciloscopía en serie de 6 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco estéril con tapa de rosca contenido en bolsa de plástico con cierre hermético.	Muestras de saliva o vómito en contenedores no solicitados, con aditivos o en medios de transportes.	1 día	Numerar las muestras en la tapa del contenedor o en la etiqueta. No se emite preliminar.
2628	Cultivo de Neisseria gonorrhoeae	Hisopado en medio de transporte AMIES/carbón activado y Laminilla para tinción Gram	Muestra tomada con hisopos con soporte de madera, seco, en medio casero o aditivos	7 días	Si se emite preliminar a solicitud del cliente.
4196	Identificación de levaduras y pruebas de sensibilidad a antifúngicos	Caja petri de plástico con Agar Dextrosa-Saboraud sellada. Vías respiratorias altas: Hisopado en medio Stuart.	Contenedores no solicitados, caja petri de vidrio o sin sellar. Agar seco, medios selectivos o diferenciales.	5 días	No se emite preliminar.
4218	Cultivo de exudado nasal a 2 narinas	Exudado nasal en medio de transporte Stuart. Un medio identificado para cada narina.	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	3 días	No se emite preliminar.
4220	Cultivo de exudado conjuntival	Exudado conjuntival en medio de transporte Stuart	Exudado tomado con hisopos con soporte de madera, seco o en medio casero.	2 días	No se emite preliminar.
4221	Cultivo de heridas y abscesos	Líquido de absceso o herida en frasco estéril con tapa de rosca o tubo estéril y Laminilla para tinción Gram.	Contenedores no adecuados o con aditivos.	3 días	No se emite preliminar.
4299	Cultivo de ambiente	Caja petri de plástico con Agar sangre o Agar Chocolate sellada y en bolsa con cierre hermético.	Contenedores no solicitados, caja petri de vidrio o sin sellar. Agar seco, medios selectivos o diferenciales.	13 días	No se emite preliminar.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1607	17 Alfa Hidroxiprogesterona neonatal	* 2 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
1857	17 Alfa-Hidroxiprogesterona serica	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1856	17 Cetoesteroides en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1153	17 Cetoesteroides en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2525	17 Hidroxi esteroides en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
587	17 Hidroxicorticoesteroides en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1154	17 Hidroxicorticoesteroides en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2684	2 Mercapto - Etanol	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2078	Ac anti (Jo - 1)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
125	Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1255	Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4271	Ac. anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgA	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2638	Ac. anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgG	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2927	Ac. anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgM	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3094	Ac anti Bloqueadores acetilcolina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2299	Ac anti Borrelia burgdorferi en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo.	2 dias	Muestra insuficiente.
554	Ac anti Borrellia burgdorferi (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2446	Ac anti Borrellia burgdorferi (IgG e IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
304	Ac anti Borrellia burgdorferi (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
850	Ac anti Cardiolipinas (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
851	Ac anti Cardiolipinas (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
195	Ac anti Cardiolipinas (IgG e IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2067	Ac anti Celulas Parietales	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
206	Ac anti Centromero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2954	Ac anti Chikungunya (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2955	Ac anti Chikungunya (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
229	Ac anti Chlamydia trachomatis (IgA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
413	Ac anti Chlamydia trachomatis (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
217	Ac anti Chlamydia trachomatis (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
242	Ac anti Cisticerco en LCR	2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo.	1 dia	Muestra insuficiente.
252	Ac anti Cisticerco en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
263	Ac anti Citomegalovirus (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
274	Ac anti Citomegalovirus (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2493	Ac Anti Citoplasma de neutrofilo citoplasmaticos (ANCA-C o Ac Anti-PR3)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1692	Ac Anti Citoplasma de neutrofilo perinuclearles (ANCA-P o Ac Anti-MPO)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4167	Ac anti Citoplasma de neutrofilo (C Y P) IFI	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4289	Ac anti Coccidioides (IgG e IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1166	Ac anti Cryptococcus neoformans	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1091	Ac anti Dengue (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1092	Ac anti Dengue (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2253	Ac anti DNA cadena sencilla	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
297	Ac anti DNA doble cadena	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4124	Ac anti Donador especifico (DSA)	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4163	Ac anti Echo virus en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	6 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1834	Ac anti Endomisio (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

4139	Ac anti Endomisio (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	17 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
185	Ac anti Entamoeba histolytica (Serameba)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
483	Ac anti Epstein BARR (IgG) Ag temprano	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
486	Ac anti Epstein BARR (IgG) Ag. nuclear	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
490	Ac anti Epstein BARR (IgG) capsida	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3218	Ac anti Epstein BARR (IgM) Ag temprano	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
493	Ac anti Epstein BARR (IgM) Ag. nuclear	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
491	Ac anti Epstein BARR (IgM) capsida	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
329	Ac anti Espermatozoides (directos)	* 2.0 ml semen a temperatura ambiente y 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), contenedor de plastico limpio y con tapa de rosca.	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
805	Ac anti Fosfolipidos (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
806	Ac anti Fosfolipidos (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4104	Ac anti GAD 65 (Acido glutamico descarboxilasa)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1833	Ac anti Gliadina (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1832	Ac anti Gliadina (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4136	Ac anti Gliadina (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
482	Ac anti Helicobacter pylori (IgA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
350	Ac anti Helicobacter pylori (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1390	Ac anti Helicobacter pylori (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2024	Ac anti Hepatitis A (HAV-G/HAV-M)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
122	Ac anti Hepatitis A IgG (HAV-G)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
123	Ac anti Hepatitis A IgM (HAV-M)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
131	Ac anti Hepatitis C (aHCV)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

334	Ac anti Hepatitis D (HDV)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2545	Ac anti Hepatitis E (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2546	Ac anti Hepatitis E (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
361	Ac anti Herpes I (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
372	Ac anti Herpes I (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
383	Ac anti Herpes II (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
394	Ac anti Herpes II (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2130	Ac anti Histonas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
299	Ac anti Histoplasma capsulatum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
416	Ac anti HIV 1 y 2 (aHIV-1 / aHIV-2)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2922	Ac anti HLA PRA (Trasplante)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
260	Ac anti Insulina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
543	Ac anti Islotes de Langerhans	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	6 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
423	Ac anti Leptospira (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1871	Ac anti LKM/1 (IgG) (Microsomales higado y riñon)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1149	Ac anti Membrana basal glomerular	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1873	Ac anti Mitocondriales	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3095	Ac anti Moduladores acetilcolina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
446	Ac anti Musculo liso	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
400	Ac anti Mycobacterium tuberculosis (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
314	Ac anti Mycobacterium tuberculosis (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
844	Ac anti Mycoplasma pneumoniae (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
845	Ac anti Mycoplasma pneumoniae (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2552	Ac anti Neumococo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	4 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
487	Ac anti Nucleares IFI (ANA)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1475	Ac anti Nucleares (ANA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1831	Ac anti Nucleosoma (N-h-Ab)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1095	Ac anti Parotiditis (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1096	Ac anti Parotiditis (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1076	Ac anti Parvovirus B19 (IgG e IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1676	Ac anti Peptido ciclico citrulinado (CCP)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1453	Ac anti Peroxidasa tiroidea (a-TPO)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
582	Ac anti Plaquetarios	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3120	Ac anti Receptor de TSH	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1065	Ac anti Receptores acetilcolina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2076	Ac anti Reticulina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1	Ac anti Ribonucleoproteina (RNP)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1183	Ac anti Rickettsia (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1180	Ac anti Rickettsia (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
502	Ac anti RNA	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3065	Ac anti Rotavirus (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3066	Ac anti Rotavirus (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
531	Ac anti Rubeola (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
542	Ac anti Rubeola (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4241	Ac anti Saccharomyces cerevisiae (IgG e IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	8 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2367	Ac anti Salmonella sp.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1063	Ac anti Sarampion (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1064	Ac anti Sarampion (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
300	Ac anti SCL-70 (Anti-Esclerodermia)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3062	Ac anti Sincicial respiratorio (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3063	Ac anti Sincicial respiratorio (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
574	Ac anti Smith (Sm)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
585	Ac anti SSA (Ro)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
595	Ac anti SSB (La)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
599	Ac anti Tiroglobulina (a-TG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1144	Ac anti Toxocara (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
603	Ac anti Toxoplasma gondii (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
604	Ac anti Toxoplasma gondii (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4262	Ac anti Transglutaminasa (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
56	Ac anti Transglutaminasa (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
280	Ac anti Treponema pallidum (FTA-ABS)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
605	Ac anti Treponema pallidum (Sifilis)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
331	Ac anti Trypanosoma cruzi (Chagas)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2080	Ac anti Varicela (IgG) herpes Zoster	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2081	Ac anti Varicela (IgM) herpes Zoster	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2250	Ac de Centro de hepatitis B CORE IgM (aHBcM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2249	Ac de Centro de hepatitis B CORE (aHBc)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1187	Acetaminofen (Tylenol)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2082	Acetona en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	4 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1877	Acido 5-Hidroxi-Indolacetico en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
338	Acido delta aminolevulinico en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
424	Acido folico (Folatos)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2089	Acido hipurico (Tolueno) en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	14 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
516	Acido urico	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1652	Acido urico en orina de 24 Hrs	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
621	Acido valproico	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
610	Acido vanilmandelico en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1193	Acidos grasos libres en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
568	Actividad triptica en heces	* 10 g heces fecales recientes (tamaño de una nuez) en refrigeracion.	contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2038	Adenosin desaminasa (ADA)	* 5.0 ml de liquido corporal refrigerado (suero, LCR, pleural o peritoneal).	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o jeringa asegurando embolo.	7 dias	Muestra insuficiente.
2	Adrenalina en orina 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1060	Adrenalina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolecta en tubo tapon lila (EDTA).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
128	Ag "e" de Hepatitis B (HBeAg)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
130	Ag "s" de Hepatitis B (HBsAg)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
143	Ag de Histocompatibilidad HLA-B27	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	4 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
611	Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1396	Ag Chlamydia trachomatis	Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	1 dia	Ver pagina 28.
2150	Ag Giardia lamblia	* 10 g heces fecales recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2069	Ag Helicobacter pylori en heces		10 g heces fecales recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2860	Ag. histocompatibilidad HLA clase II por PCR-SSP	*	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2859	Ag. histocompatibilidad HLA clase I por PCR-SSP	*	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2835	Ag. histocompatibilidad HLA clase I y II por PCR-SSP	*	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	12 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3064	Ag NS1 vs dengue		2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
612	Ag Prostatico especifico (PSA TOTAL)		2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2020	Ag Prostatico fraccion libre (PSA LIBRE)		2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
278	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)		2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
24	Albumina		2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
565	Albumina en orina de 24 hrs		20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
878	Albumina en orina ocasional		20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
59	Alcohol		2.0 ml suero refrigerado o 20 ml orina ocasional.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
70	Aldolasa	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1886	Aldosterona en orina de 24 Hrs	*	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
81	Aldosterona serica		2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3078	Alergeno abedul blanco	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2748	Alergeno acacia	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2303	Alergeno acarussiro	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2742	Alergeno agrostis alba	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2566	Alergeno aguacate	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2992	Alergeno ajo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2974	Alergeno ajonjolí	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2734	Alergeno alamo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2531	Alergeno albahaca	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2590	Alergeno alfa lactoalbumina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2442	Alergeno algodón	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2669	Alergeno almeja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2483	Alergeno almendra	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3193	Alergeno alpiste	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2584	Alergeno alternaria	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2867	Alergeno alternaria tenuis	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3176	Alergeno alubia (frijol blanco)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2578	Alergeno amaranthus hybridus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2803	Alergeno amaranto	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2307	Alergeno ambrosia	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2556	Alergeno amoxicilina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2557	Alergeno ampicilina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2863	Alergeno anís	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2952	Alergeno anisakis	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2730	Alergeno apio	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2848	Alergeno arandano	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4240	Alergeno árbol de algodón	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2571	Alergeno arroz	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2583	Alergeno artemisa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2951	Alergeno ascaris	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2364	Alergeno aspergillus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2868	Alergeno aspergillus clavatus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2869	Alergeno aspergillus flavus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2825	Alergeno aspergillus fumigatus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2870	Alergeno aspergillus nidulans	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2871	Alergeno aspergillus oryzae	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2872	Alergeno aspergillus terreus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2579	Alergeno atriplex canescens	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3082	Alergeno atriplex cernitifolia	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2386	Alergeno atun	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2570	Alergeno avellana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2633	Alergeno avena	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2559	Alergeno avispa amarilla	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2560	Alergeno avispa cara blanca	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2561	Alergeno avispa europea	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2562	Alergeno avispa papelera	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2646	Alergeno avispon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2864	Alergeno bacalao	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3026	Alergeno berenjena	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2591	Alergeno beta lactoglobulina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3085	Alergeno blomia tropicalis	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2568	Alergeno brocoli	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2676	Alergeno bromo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2413	Alergeno cacahuete	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2731	Alergeno cacao	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2448	Alergeno cafe	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2668	Alergeno calabaza	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2313	Alergeno camaron	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2662	Alergeno candida albicans	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2670	Alergeno cangrejo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2480	Alergeno caña de azucar	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3029	Alergeno carne de carnero (cordero)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2309	Alergeno carne de cerdo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2487	Alergeno carne de pavo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2318	Alergeno carne de pollo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2319	Alergeno carne de res	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2725	Alergeno caseina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2747	Alergeno caspa de caballo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2517	Alergeno caspa de perro	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2960	Alergeno caspa de vaca	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2789	Alergeno cebada	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2385	Alergeno cebolla	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3163	Alergeno cecina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2519	Alergeno cedro	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2702	Alergeno cedro de la montaña	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2692	Alergeno celulosa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4134	Alergeno centeno	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4225	Alergeno ceñigo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4298	Alergeno cephalosporium acremonium	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3190	Alergeno cereza	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2873	Alergeno chaetomium globosum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2314	Alergeno champiñon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2746	Alergeno chayote	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2503	Alergeno chicharo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2680	Alergeno chinche	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2347	Alergeno chocolate	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2808	Alergeno ciruela	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2661	Alergeno cladosporium herbarum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2697	Alergeno clara de huevo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3027	Alergeno coco	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4238	Alergeno col	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2694	Alergeno coliflor	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2640	Alergeno cucaracha alemana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2529	Alergeno cucaracha americana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2874	Alergeno curvularia lunata	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4145	Alergeno de orina de raton	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4115	Alergeno de te	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2400	Alergeno dermatophagoides farinae (acaro)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2655	Alergeno dermatophagoides microceras	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2399	Alergeno dermatophagoides pteronyssinus (acaro)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2722	Alergeno diente de leon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2588	Alergeno durazno	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2504	Alergeno ejote	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2735	Alergeno encino	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4239	Alergeno enterotoxina A	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2736	Alergeno epazote	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3086	Alergeno epicoccum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4176	Alergeno epitelio cabra	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3141	Alergeno epitelio de Cerdo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4250	Alergeno epitelio de cobayo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3142	Alergeno epitelio de conejo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2403	Alergeno epitelio de gato	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3143	Alergeno epitelio de oveja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2862	Alergeno epitelio de rata	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3053	Alergeno epitelio de raton	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4185	Alergeno epitelio de hamster	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2305	Alergeno epitelio de perro	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4154	Alergeno epicoccum purpurascens	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2727	Alergeno espinaca	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3208	Alergeno esporas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2733	Alergeno eucalipto	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2716	Alergeno excremento de paloma	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3083	Alergeno franseria acanthicarpa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2371	Alergeno fresa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2749	Alergeno fresno (Fraxinus sp.)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3019	Alergeno fresno blanco	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4140	Alergeno frijol de soya	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2411	Alergeno frijol pinto	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2732	Alergeno frijol rojo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2875	Alergeno fusarium uniforme	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2652	Alergeno garbanzo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3087	Alergeno gato	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2581	Alergeno girasol	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2423	Alergeno gluten	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2972	Alergeno glycyphagus domesticus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2580	Alergeno helminthosporium sp.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4237	Alergeno hierba cola de cordero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3001	Alergeno hierba comun	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2750	Alergeno hierba falsa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3081	Alergeno hierba timotea	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3020	Alergeno hierba trepadora	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2909	Alergeno higo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2647	Alergeno hormiga roja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

3025	Alergeno huachinango	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2311	Alergeno huevo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4278	Alergeno isocinato HDI	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2394	Alergeno jamon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2653	Alergeno jengibre	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2391	Alergeno jitomate	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2678	Alergeno kiwi	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2453	Alergeno lana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3179	Alergeno langosta	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2630	Alergeno latex	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2982	Alergeno leche de cabra	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2799	Alergeno leche de soya	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2310	Alergeno leche de vaca	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2983	Alergeno leche hervida	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2695	Alergeno lechuga	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3084	Alergeno lengua de vaca	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2651	Alergeno lenteja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2481	Alergeno levadura	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3030	Alergeno levadura de cerveza	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2346	Alergeno limon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2975	Alergeno macarela	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2393	Alergeno maiz cultivado	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4148	Alergeno malta	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

3028	Alergeno mamey	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2572	Alergeno mango	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2402	Alergeno manzana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2786	Alergeno manzanilla (Chamaemelum nobile)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2345	Alergeno melon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2398	Alergeno mezcla col, coliflor y brocoli	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2401	Alergeno mezcla de citricos (limon, lima, naranja)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2745	Alergeno mezcla de embutidos	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2723	Alergeno mezcla de hierbas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2666	Alergeno mezcla de mariscos (ostion, almeja, cangrejo, atun)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2721	Alergeno mezcla de robles	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2793	Alergeno mezquite	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2785	Alergeno miel de abeja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2645	Alergeno mora azul	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2563	Alergeno mosquito	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4269	Alergeno mostaza	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2639	Alergeno mucor racemosus	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2342	Alergeno naranja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2576	Alergeno nogal	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2343	Alergeno nuez	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2984	Alergeno nuez de Brasil	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3046	Alergeno nuez de castilla	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3047	Alergeno nuez pecana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

4165	Alergeno olivo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2744	Alergeno onopordum acanthium (cardo ruso)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2308	Alergeno oregano	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2717	Alergeno orina de rata	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2632	Alergeno ostion	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2810	Alergeno ovoalbumina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4277	Alergeno palma datilera	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2382	Alergeno palma reina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2392	Alergeno papa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2631	Alergeno papaya	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2720	Alergeno pasto avena	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4103	Alergeno pasto azul	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2792	Alergeno pasto bahia	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3080	Alergeno pasto ballico	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2585	Alergeno pasto Bermuda	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4175	Alergeno pasto bromo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2885	Alergeno pasto canario	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2886	Alergeno pasto centeno	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2518	Alergeno pasto comun	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4247	Alergeno pasto de carrizal	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4249	Alergeno pasto de centeno silvestre	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2890	Alergeno pasto de huerto	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4248	Alergeno pasto de pradera	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2891	Alergeno pasto invernol	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2586	Alergeno pasto Johnson	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2826	Alergeno pasto perenne	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2887	Alergeno pasto silvestre	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2892	Alergeno pasto terciopelo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2587	Alergeno pasto timothy	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2773	Alergeno pasto trigo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2741	Alergeno pata de gallo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
148	Alergeno penicilina G	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2454	Alergeno penicilina V	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2530	Alergeno penicillium brevicompactum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2876	Alergeno penicillium notatum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2787	Alergeno pepino	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2664	Alergeno pera	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2794	Alergeno perejil	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3088	Alergeno perro	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2370	Alergeno pescado	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2877	Alergeno phoma betae	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2667	Alergeno pimienta negra	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4268	Alergeno pimienta roja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3161	Alergeno pimienta verde	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2953	Alergeno pino australiano	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2703	Alergeno pino blanco	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2567	Alergeno piña	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2738	Alergeno pirul	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4186	Alergeno pistache	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2878	Alergeno pityrosporum orbiculare	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2739	Alergeno plantago spp.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2449	Alergeno platano	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2801	Alergeno plumas de canario	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2656	Alergeno plumas de ganso	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4153	Alergeno plumas de loro	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2718	Alergeno plumas de pato	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2802	Alergeno plumas de pavo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2657	Alergeno plumas de periquito	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2658	Alergeno plumas de pollo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4226	Alergeno polen avena	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2306	Alergeno polen rape	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2973	Alergeno polilla	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2693	Alergeno polipropileno	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2304	Alergeno polvo casero alergopharma	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2589	Alergeno polvo casero Bencard	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2660	Alergeno polvo casero Greer	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2582	Alergeno polvo casero Hollister - Stier	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2795	Alergeno polvo casero japones	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2704	Alergeno pulpo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2312	Alergeno queso cheddar	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2809	Alergeno queso tipo mohoso	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2681	Alergeno rata	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2719	Alergeno raton	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3040	Alergeno rhizopus nigricans	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2575	Alergeno salmon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2788	Alergeno sandia	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2417	Alergeno sardina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2675	Alergeno sauce	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2865	Alergeno seda	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2740	Alergeno sorghum spp.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4227	Alergeno sorgo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2384	Alergeno soya	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2573	Alergeno tomate	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2569	Alergeno toronja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2879	Alergeno trichoderma viride	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2881	Alergeno trichophyton	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2880	Alergeno trichosporon pullulans	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2362	Alergeno trigo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4149	Alergeno trigo sarraceno	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2978	Alergeno trucha	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2577	Alergeno trueno (Ligustrum sp.)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2882	Alergeno ulocladium chartarum	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2691	Alergeno uva	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2696	Alergeno vainilla	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2533	Alergeno vara dorada	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2698	Alergeno veneno avispa amarilla	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2649	Alergeno veneno avispa cafe	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2648	Alergeno veneno avispa papelera	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2574	Alergeno veneno de abeja	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2659	Alergeno yema de huevo	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2715	Alergeno yogurt	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2390	Alergeno zanahoria	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1006	Alfa 1 antitripsina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3061	Alfa 2 macroglobulina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
105	Alfafetoproteina (AFP)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1198	Aluminio en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1200	Amikacina en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
129	Amilasa	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
140	Amilasa en orina de 24 Hrs	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1070	Aminoacidos en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	8 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1201	Aminoacidos en sangre	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	8 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
151	Amonio	2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Ayuno de 4 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1532	Analisis bacteriologico de agua potable	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	7 dias	Ver pagina 28
3169	Analisis de agua para deteccion de vibrio cholerae	* 100 ml agua temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

3186	Análisis físico - químico de agua NOM 127	* 1000 ml agua temperatura ambiente.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	13 días	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
4242	Análisis físico químico de agua residual NOM 003	* 1000 ml agua temperatura ambiente.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	13 días	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
343	Análisis físico-químico de agua potable	* 1000 ml agua temperatura ambiente.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	7 días	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2093	Andrógenos totales	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
163	Androstenediona	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
174	Anfetaminas en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
1204	Angiotensina	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
609	Anti Estreptolisina O (ASO)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
420	Anticoagulante lupico	2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , tubo mal aforado.
4128	Anticoagulante lupico confirmatorio	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , tubo mal aforado.
613	Antitrombina III	2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , tubo mal aforado.
614	Apolipoproteínas A1	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
702	Apolipoproteínas B	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
429	Arsénico en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	9 días	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2404	Arsénico en sangre	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
277	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1422	Azúcares reductores en heces	10 g heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeración.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emitidas. Sin ingerir antiparasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. (Estabilidad 24 horas).	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
618	Baciloscopia 1 muestra	Ver página 27.	Ver página 27.	1 día	Ver página 27.
619	Baciloscopia en serie de 2 muestras	Ver página 27.	Ver página 27.	1 día	Ver página 27.
620	Baciloscopia en serie de 3 muestras	Ver página 28.	Ver página 28.	1 día	Ver página 28.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

617	Bacilosopia en serie de 4 muestras	Ver pagina 27.	Ver pagina 27.	1 dia	Ver pagina 27.
622	Bacilosopia en serie de 5 muestras	Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	1 dia	Ver pagina 28.
2094	Bacilosopia en serie de 6 muestras	Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	1 dia	Ver pagina 28.
1208	Bandas oligoclonales L.C.R.	* 2.0 ml suero y 2.0 ml LCR refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y jeringa asegurando embolo.	15 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente.
301	Barbituricos en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2469	Benzodiacepinas en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
54	Beta 2 microglobulina en orina de 24 hrs	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2259	Beta 2 microglobulina serica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
769	Bicarbonato (HCO3) en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
705	Bilirrubina directa	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
704	Bilirrubina indirecta	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
625	Bilirrubina total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
745	Bilirrubinas (BT, BD y BI)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
692	Biometria hematica	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra coagulada.
2510	Biopsia de apendice	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
1504	Biopsia de cervix	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2541	Biopsia de colon	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2509	Biopsia de cono cervical	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2507	Biopsia de endometrio	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2544	Biopsia de esofago	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2538	Biopsia de huso de piel	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2516	Biopsia de lipoma	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2513	Biopsia de mama	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2539	Biopsia de nevo	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2511	Biopsia de polipo	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2506	Biopsia de prostata	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2512	Biopsia de restos ovulo-placentarios	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2514	Biopsia de sitio especifico (de 0.0 - 3.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
4354	Biopsia de sitio especifico (de 3.1 - 7.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
4355	Biopsia de sitio especifico (de 7.1 - 12.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
4356	Biopsia de sitio especifico (mayor a 12.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2101	Biopsia de testiculo	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
4370	Biopsia de utero con anexos	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2100	Biopsia de utero sin anexos	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2515	Biopsia de verruga	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2099	Biopsia de vesicula	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2508	Biopsia gastrica	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	Contenedores diferentes al solicitado, sin formol al 10% y/o sin cuestionario (pagina 12).
2097	Biopsia por aspiracion con aguja fina (BAAF)	* Jeringa o laminilla fijada con alcohol de 96° temperatura ambiente.	Jeringa asegurando embolo o laminilla rotulada.	7 dias	Envio sin cuestionario (pagina 12).
1597	Biotinidasa	* 2 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
652	Blastos (Busqueda de)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
254	Busqueda de cryptosporidium	* 10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1986	Busqueda rapida de hongos y levaduras (KOH)	Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	1 dia	Ver pagina 28.
631	CA 125 (ovario)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
632	CA 15-3 (mama)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
633	CA 19-9 (pancreas-colon)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
564	CA 27-29 (pulmon)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1205	CA 72-4	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1911	Cadenas kappa/lambda (ligeras) en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1912	Cadenas kappa/lambda (ligeras) en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3196	Cadmio	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	10 dias	
634	Calcio	2.0 ml suero en refrigeracion.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1582	Calcio en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1565	Calcio Ionizado	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

3	Calcitonina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
5	Cannabinoides (Marihuana) en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
4107	Cannabinoides en orina (prueba confirmatoria)	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	9 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
9	Capacidad de union del hierro total	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
10	Carbamazepina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1215	Carboxihemoglobina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	
2897	Carga viral de herpes simplex I (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
3136	Carga viral de herpes simplex II (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
2028	Carga Viral para citomegalovirus (PCR CMV) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
2896	Carga viral para Epstein BARR (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
2107	Carga viral para hepatitis B (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
579	Carga viral para hepatitis C (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
464	Carga viral para HIV (RNA) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
4261	Carga viral para virus BK tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ muestra insuficiente.
2800	Cariotipo en medula osea	* 5.0 mL sangre total con heparina refrigerada (A partir de la toma 24 hrs. de estabilidad).	Tubo tapon verde o jeringa heparinizada.	28 dias	Volumen insuficiente, aditivos no solicitados, sin cuestionario (pagina 14).
183	Cariotipo en sangre periferica	* 5.0 mL sangre total con heparina refrigerada (A partir de la toma 24 hrs. de estabilidad).	Tubo tapon verde o jeringa heparinizada.	28 dias	Volumen insuficiente, aditivos no solicitados, sin cuestionario (pagina 14).
1216	Carotenos	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) protegido de la luz.	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
477	Catecolaminas totales en orina 24 h	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1133	Catecolaminas totales en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2007	Celulas L-E (Lupus eritematoso)	5.0 ml sangre total temperatura ambiente.	Recolectar en tubo tapon rojo no centrifugar.	1 dia	Cualquier otro contenedor.
407	CEPA P / identificacion y antibiograma	* Cepa en caja petri temperatura ambiente.	Caja petri.	5 dias	Cepa contaminada.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1217	Ceruloplasmina en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
404	Chlamydia trachomatis (Busqueda de)	* 2 laminillas sin fijar a temperatura ambiente .	Laminilla sin fijar.	3 dias	Material insuficiente.
2123	Chlamydia trachomatis (PCR)	* Cepillado uretral/vaginal temperatura ambiente.	Medio especial.	7 dias	Tubo seco, hisopo de algodón.
15	Ciclosporina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2500	Cistatina "C"	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
182	Citología cervico vaginal	* Laminilla fijada con alcohol de 96°.	Portalaminilla rotulada.	3 dias	Material insuficiente.
2115	Citología de moco fecal	* 10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Material insuficiente.
2112	Citología liquidos varios	* 5.0 ml liquido corporal temperatura ambiente.	Jeringa asegurando embolo o frasco esteril.	3 dias	Material insuficiente.
16	Citología nasal	* Laminilla fijada con alcohol de 96°.	Portalaminilla rotulada.	3 dias	Material insuficiente.
1776	Citología uretral	* Laminilla fijada con alcohol de 96°.	Portalaminilla rotulada.	3 dias	Material insuficiente.
22	Citoquimico y citologico de liquido sinovial o articular	5.0 ml liquido refrigerado.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
17	Citoquimico y citologico de liquido biologicos (fuera de los anteriores)	5.0 ml liquido refrigerado.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
18	Citoquimico y citologico de liquido cefalorraquideo	5.0 ml liquido refrigerado.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
19	Citoquimico y citologico de liquido de ascitis o peritoneal	5.0 ml liquido refrigerado.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
20	Citoquimico y citologico de liquido de dialisis	5.0 ml liquido refrigerado.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
21	Citoquimico y citologico de liquido pleural	5.0 ml liquido pleural refrigerado y 2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1596	Citratos en orina de 24 hrs (Acido citrico)	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
23	Clonazepam (Rivotril)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
25	Cloro	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

26	Cloro en orina de 24 horas	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1916	Clostridium difficile toxina A, toxina B, + GDH	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeración.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
28	Coagulación de líquido cefalorraquídeo	* 2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo..	2 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
431	Cobre en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	8 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2017	Cobre en suero	* 3.0 ml suero.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	8 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
30	Cocaína	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
34	Colesterol total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
31	Colesterol HDL	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
32	Colesterol LDL	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
696	Colesterol VLDL	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2119	Colesterol HDL, LDL, VLDL	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
36	Colinesterasa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3128	Colinesterasa eritrocitaria	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	10 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
38	Complemento C3	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
39	Complemento C4	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
40	Complemento hemolítico 50 (CH50)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4102	Concentración mínima inhibitoria	* Caja petri con cepa pura.	Agar gelosa sangre, caja petri con cepa.	2 días	Cepa contaminada.
6	Confirmatorio para HBsAg	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
41	Coombs directo (Ac anti - RH eritrocitarios)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
42	Coombs indirecto (Ac anti - RH sericos)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1356	Coprologico	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedor de plastico, limpio, con tapa de rosca y sin aditivos.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
43	Coproparasitoscopico 1 muestra	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedor de plastico, limpio, con tapa de rosca y sin aditivos.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
71	Coproparasitoscopico 2 muestras	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedores independientes para cada dia, de plastico, limpios, con tapa de rosca y sin aditivos.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
44	Coproparasitoscopico 3 muestras	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion.	Contenedores independientes para cada dia, de plastico, limpios, con tapa de rosca y sin aditivos.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
47	Cortisol en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1113	Cortisol en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
253	Coxsackie virus A anticuerpos (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	12 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4161	Coxsackie virus anticuerpos del grupo A	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	12 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2811	Coxsackie virus anticuerpos del grupo B	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	12 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
48	Creatina cinasa (CK)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
49	Creatina cinasa MB (CK-MB)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
50	Creatinina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1016	Creatinina en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2083	Crioaglutininas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
55	Crioglobulinas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1529	Cristalografia de moco cervical	Laminilla sin fijar.	Laminilla sin fijar.	1 dia	Muestra insuficiente.
1926	Cromo en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	8 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2066	Cromo en suero	* 3.0 ml suero.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	8 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3072	Cromogranina A	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2494	Cuadruple marcador gestacional	* 2.0 ml suero refrigerado (anexar cuestionario y USG).	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++. Sin cuestionario y/o USG (pagina 13).
2930	Cuantificacion del cromosoma Filadelfia (BCR-ABL) por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
212	Cuenta de plaquetas	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
403	Cultivo balanoprepucial	* Ver pagina 27.	Ver pagina 27.	3 dias	Ver pagina 27.
521	Cultivo de	* Ver pagina 27.	Ver pagina 27.	3 dias	Ver pagina 27.
346	Cultivo de alimentos	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	7 dias	Ver pagina 25.
4299	Cultivo de ambiente	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	13 dias	Ver pagina 28.
348	Cultivo de expectoracion	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
4220	Cultivo de exudado conjuntival	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	3 dias	Ver pagina 28.
353	Cultivo de exudado faringeo	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
352	Cultivo de exudado nasal	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
4218	Cultivo de exudado nasal 2 narinas	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	3 dias	Ver pagina 28.
358	Cultivo de exudado naso-faringeo	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
351	Cultivo de exudado oftalmico	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
371	Cultivo de exudado otico	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
354	Cultivo de exudado uretral	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
355	Cultivo de exudado vaginal	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
357	Cultivo de exudado vulvar	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
356	Cultivo de heces (Coprocultivo)	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
4221	Cultivo de heridas y abscesos	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	3 dias	Ver pagina 28.
360	Cultivo de liquidos corporales	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
401	Cultivo de mycoplasma hominis	* Ver pagina 27.	Ver pagina 27.	3 dias	Ver pagina 27.
2628	Cultivo de neisseria gonorrhoeae	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	7 dias	Ver pagina 28.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

367	Cultivo de orina (Urocultivo)	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
368	Cultivo de punta de cateter	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
370	Cultivo de secrecion	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
373	Cultivo de semen (Espermocultivo)	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	3 dias	Ver pagina 26.
349	Cultivo de superficies inertes	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	7 dias	Ver pagina 25.
375	Cultivo de superficies vivas	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	7 dias	Ver pagina 26.
347	Cultivo de uñas (bacteriologico)	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	3 dias	Ver pagina 25.
406	Cultivo de ureaplasma urealyticum	* Ver pagina 27.	Ver pagina 27.	3 dias	Ver pagina 27.
374	Cultivo de vibrio cholerae	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	5 dias	Ver pagina 26.
376	Cultivo micologico (Hongos no levaduras)	* Ver pagina 26.	Ver pagina 26.	21 dias	Ver pagina 26.
345	Cultivo para busqueda de anaerobios	* Ver pagina 25.	Ver pagina 25.	7 dias	Ver pagina 25.
523	Cultivo para mycobacterium tuberculosis	* Ver pagina 27.	Ver pagina 27.	42 dias	Ver pagina 27.
1539	Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-SO4)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
60	Dehidroepiandrosterona total (DHEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2088	Dehidrotestosterona (DHT)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2415	Depuracion de creatinina en orina de 24 hrs.	2.0 ml suero refrigerado, 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), contenedor de plastico limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
535	Depuracion de urea en orina 24 hrs.	2.0 ml suero refrigerado, 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), contenedor de plastico limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
63	Deshidrogenasa lactica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

580	Deteccion y genotipificacion del VPH por PCR	* Exudado vaginal o uretral.	Cepillado cervical o uretral. Solicitar con anticipacion el material para la toma de la muestra (sin costo). Para el caso de pacientes femeninos, se recomienda no estar menstruando al momento de la toma y sin aplicacion de ovulos ni duchas vaginales 3 dias previos.	10 dias	Hisopo de algodón o medio inadecuado.
64	Diazepam (Valium, Alboral)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
66	Digoxina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
244	Dimero D	2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestras mal aforadas.
1054	Dioxido de carbono	2.0 ml suero en refrigeracion.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2039	Dopamina en orina 24 h	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1134	Dopamina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente.	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2427	Duo marcador gestacional	* 2.0 ml suero refrigerado anexar cuestionario y USG.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Sin cuestionario y/o USG (pagina 13).
2491	D-xilosa en suero a los 120 minutos	* 2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido solucion de D-Xilosa.	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2492	D-xilosa en suero a los 60 minutos	* 2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido solucion de D-Xilosa.	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1860	D-xilosa basal en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2985	Electroforesis de hemoglobina acida	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	No se recomienda realizar el analisis si se ha recibido transfusiones recientemente. Se rechazan muestras hemolizadas o coaguladas.
2084	Electroforesis de hemoglobina alcalina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	No se recomienda realizar el analisis si se ha recibido transfusiones recientemente. Se rechazan muestras hemolizadas o coaguladas.
2085	Electroforesis de lipoproteinas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

532	Electroforesis de proteinas en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo.	5 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++ Muestra insuficiente.
2416	Electroforesis de proteinas en orina 24 horas	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	5 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
68	Electroforesis de proteinas en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
200	Electrolitos (Na, K, Cl) en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1840	Electrolitos sericos (Na, K)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
69	Electrolitos sericos (Na, K, Cl)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2072	Electrolitos sericos (Na, K, Cl, CO2)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2074	Electrolitos sericos (Na, K, Cl, Li)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2068	Electrolitos sericos (Na, K, Li)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1841	Electrolitos sericos (Na,K,Cl,Ca)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1843	Electrolitos sericos (Na,K,Cl,Ca,P,Mg)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
74	Eosinofilos en moco nasal	2 Laminillas sin fijar, rotuladas por cada narina y a temperatura ambiente.	Hisopado nasal de ambas narinas en laminillas independientes e identificadas.	1 dia	Laminillas rotas o no identificadas poor cada narina.
539	Eritropoyetina (EPO)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
75	Espermatozoides directa	5.0 ml semen a temperatura ambiente.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
77	Estradiol (E2)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1991	Estriol serico no conjugado (uE3)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
80	Estrogenos totales	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
560	Estrona	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2447	Examen en fresco	Cepillado o hisopado con solucion salina.	Hisopo en tubo limpio con tapon.	1 dia	Cepillado o hisopo en seco.
83	Examen general de orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2087	Factor II de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2102	Factor IX de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
85	Factor Reumatoide cuantitativo	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2120	Factor V de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
1147	Factor V mutacion Leiden	* 5.0 ml sangre con EDTA.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	12 dias	Tubo mal aforado.
2098	Factor VII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
2125	Factor VIII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
1132	Factor Von Willebrand antigenico	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
2104	Factor X de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
556	Factor XI de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
2113	Factor XII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
1938	Factor XIII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
721	Fenilalanina en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
714	Fenilalanina neonatal	* 2 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
65	Fenitoina (Difenilhidantoina o DFH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
86	Fenobarbital	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
87	Ferritina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
88	Fibrinogeno	3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 dia	Tubo mal aforado.
1572	Filtrado Glomerular	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
93	Fosfatasa acida fraccion prostática	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
92	Fosfatasa acida total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
95	Fosfatasa alcalina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
96	Fosfolipidos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
97	Fosforo	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

98	Fosforo en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1361	Fracción beta de HGC sérica (cuantitativa)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1990	Fracción beta libre de HGC sérica (cuantitativa)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4245	Fracción beta libre de HGC sérica (cuantitativa) por RIA *	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
168	Fragilidad osmótica de eritrocitos	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2128	Frotis de sangre periférica	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1242	Fructosa en semen	* 2.0 ml semen refrigerado.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	2 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
100	Fructosamina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3173	Gabapentina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4263	Galactomanano	* 2.0 ml suero refrigerado o lavado bórneoalveolar.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	5 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1639	Galactosa total	* 2 círculos de sangre total en tarjeta Guthrie.	Tarjeta Guthrie. Ver página 20.	3 días	Ver página 21.
1638	Galactosa uridil transferasa	* 2 círculos de sangre total en tarjeta Guthrie.	Tarjeta Guthrie. Ver página 20.	3 días	Ver página 21.
101	Gamma glutamiltransferasa	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
104	Gastrina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4108	Genotipo HCV por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
730	Globulina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3071	Globulina transportadora de hormonas sexuales	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
107	Glucagon	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2432	Glucagon a los 120 min.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2430	Glucagon a los 30 min.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2431	Glucagon a los 60 min.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2797	Glucagon a los 90 min.	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

109	Glucosa	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2351	Glucosa 120 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1400	Glucosa 180 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 3 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1557	Glucosa 240 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 4 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
824	Glucosa 30 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 30 minutos despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2637	Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	
1124	Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (neonatal)	* 2 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
825	Glucosa 60 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 1 hora despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1541	Glucosa 90 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 1.5 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
964	Glucosa basal y post-prandial	2.0 ml suero refrigerado.	Basal - Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador). Post-pandrial - Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4133	Glucosa en LCR	2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo.	1 dia	Muestra insuficiente.
108	Glucosa post-Prandial	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
111	Glucosa urinaria	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1547	Gota gruesa (Investigacion de plasmodium sp)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
115	Grasa en heces	5.0 g heces (tamaño de una nuez).	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
119	Grupo sanguineo y factor RH	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Muestra coagulada.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

120	Haptoglobina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1531	Hemocultivo	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	7 días	Ver pagina 28.
1245	Hemoglobina glicosilada (A1c)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 día	Muestra coagulada.
132	Hidroxiprolina	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
133	Hierro	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1264	Histamina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	12 días	Muestra coagulada.
724	Homocisteina	2.0 ml suero o plasma en EDTA refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o en tubo tapon lila (EDTA).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
134	Hormona adrenocorticotrofica (ACTH)	2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2536	Hormona anti-mulleriana	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1505	Hormona anti-diuretica (Vasopresina)	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1808	Hormona de crecimiento a los 120 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1807	Hormona de crecimiento a los 150 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2419	Hormona de crecimiento a los 180 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2466	Hormona de crecimiento a los 210 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1806	Hormona de crecimiento a los 240 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1809	Hormona de crecimiento a los 30 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1542	Hormona de crecimiento a los 60 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1042	Hormona de crecimiento a los 90 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
137	Hormona de crecimiento basal	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
138	Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
283	Hormona estimulante de tiroides neonatal	* 2 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 días	Ver pagina 21.
139	Hormona foliculo estimulante (FSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

141	Hormona luteinizante (LH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
142	Hormona paratiroidea (Parathormona / PTH-intacta)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4196	Identificacion de levaduras y pruebas de sensibilidad a antifungicos	* Ver pagina 28.	Ver pagina 28.	5 dias	Ver pagina 28.
686	Indice de tiroxina libre (ITL)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
861	Influenza tipo A y tipo B	Escobillon o hisopo flocado para toma nasofaringea en tubo seco sin aditivos, identificados uno por cada narina.	Hisopo en tubo seco con tapon.	1 dia	Hisopos con soporte de madera, contenedores diferentes a los solicitados, hisopos no identificados por narina, presencia de sangre en el hisopo.
1955	Inhibidor de esterasa de C1	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1881	Inhibidor de factor de coagulacion IX	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
1942	Inhibidor del factor de coagulacion VIII	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	.
4181	Inhibidor funcional de esterasa C1	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2495	Inhibina A	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3170	Inmunofenotipo en sangre periferica	* 10.0 ml sangre total EDTA a temperatura ambiente. 48 horas de estabilidad a partir de la toma.	Recolectar 2 tubos tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++. Presencia de coagulos o envio sin cuestionario (pagina 15).
2908	Inmunofenotipo en medula osea	* Medula osea temperatura ambiente. 48 horas de estabilidad a partir de la toma.	Jeringa asegurando embolo.	7 dias	Presencia de coagulos o envio sin cuestionario (pagina 15).
2932	Inmunofenotipo para HPN (Hemoglobina paroxistica nocturna)	* 10.0 ml sangre total en EDTA refrigerada. 48 horas de estabilidad a partir de la toma.	Recolectar 2 tubos tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++. Presencia de coagulos o envio sin cuestionario (pagina 15).
2855	Inmunofijacion de proteinas en orina 24 horas	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	7 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2854	Inmunofijacion de proteinas en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
144	Inmunoglobulina A	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2131	Inmunoglobulinas A,G,M	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
476	Inmunoglobulina D	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
145	Inmunoglobulina E	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

146	Inmunoglobulina G	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1121	Inmunoglobulina G en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo.	12 dias	Muestra insuficiente.
147	Inmunoglobulina M	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2804	Inmunoglobulinas A,G,M,E	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1120	Inmunoglobulinas en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado.	LCR en jeringa asegurando embolo.	5 dias	Muestra insuficiente.
2030	Inmunoglobulinas G subclases IgG 1,2,3,4	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1820	Inmunotripsina reactiva	* 2 circulos de sangre total en tarjeta Guthrie.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
1270	Insulina a los 30 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 30 minutos despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1443	Insulina a los 60 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 1 hora despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1786	Insulina a los 90 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 1.5 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
488	Insulina a los 120 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1442	Insulina a los 180 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 3 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1602	Insulina a los 240 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 4 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2463	Insulina a los 300 min.	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 5 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
838	Insulina basal	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2132	Insulina post-prandial	2.0 ml suero refrigerado.	Recolectar la muestra en tubo tapon dorado (gel separador) 2 horas despues de haber consumido alimentos o solucion de glucosa.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2548	Interleucina 6	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2134	Isoenzimas de CPK	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1947	Isoenzimas de fosfatasa alcalina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2135	Isoenzimas de lactato deshidrogenasa	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2137	Lactato (Acido lactico)	3.0 ml plasma con heparina refrigerado.	Recolectar en tubo de tapon verde (heparina).	1 dia	
846	Lamotrigina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	8 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2016	Leptina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2791	Levetiracetam	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	6 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1325	Linfocitos CD3 CD4 CD8	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
1405	Linfocitos CD4 CD8	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
2728	Linfocitos inmunorreguladores con subpob. de T y B	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
3051	Linfocitos T, B Y NK	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
160	Lipasa	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
561	Lipasa en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
162	Lipidos totales	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1278	Lisis de euglobulinas	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	2 dias	Tubo mal aforado.
164	Litio	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4	Lito renal	* Lito seco en frasco esteril con tapa de rosca y sin aditivos.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	Lito con aditivos o liquidos organicos, contenedor de vidrio o diferente al solicitado.
165	Magnesio	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
166	Magnesio en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
444	Mercurio en sangre	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	10 dias	
1285	Metahemoglobina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	4 dias	

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1600	Metanefrinas totales en orina 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	3 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1019	Metanefrinas totales en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1515	Metanfetaminas	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1634	Metanol en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3217	Metotrexato	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 días	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
35	Microalbumina en orina ocasional o de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada) o 20 ml orina ocasional.Indicar volumen total y cual de las dos se envía..	20 ml orina ocasional refrigerada.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
544	Mioglobina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1554	Monotest (Paul-Bunell)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4180	Mycobacterias atípicas genotipificación por PCR	* 10 ml líquidos corporales..	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca, frasco estéril o jeringa estéril.	10 días	Volumen insuficiente.
170	Mycobacterium tuberculosis por PCR	* 10 ml líquidos corporales..	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca, frasco estéril o jeringa estéril.	10 días	Volumen insuficiente.
402	Mycoplasma genitalium por PCR	* Cepillado uretral/cervico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	10 días	Muestras que no estén en el medio de transporte específico
4189	Neisseria gonorrhoeae por PCR	* Cepillado uretral/cervico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	7 días	Muestras que no estén en el medio de transporte específico
45	Nicotina en orina (Cotina)	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	2 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
3219	Nicotina en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1849	Nitrogeno ureico (BUN)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
171	Nitrogeno ureico en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1061	Noradrenalina en orina 24 h	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	3 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1021	Noradrenalina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 días	
1560	N-telopeptidos en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	10 días	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
563	Nucleotidasa 5	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 días	

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

327	Opiaceos en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
175	Osmolaridad serica	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
176	Osmolaridad urinaria	* 20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
317	Osteocalcina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
421	Oxalatos en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1690	Oxcarbazepina (Trileptal)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	8 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2195	Panel Viral de Hepatitis I Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac anti hepatitis C (aHCV)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++
2196	Panel viral de hepatitis II Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac anti hepatitis C (aHCV) Ac anti hepatitis D (HDV) Ac anti hepatitis E (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++
2197	Panel Viral de hepatitis III Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti hepatitis C (aHCV) Ac anti hepatitis D (HDV) Ac anti hepatitis E (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++
178	Peptido C	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1910	Peptido natriuretico cerebral (BNP)	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2172	Perfil adolescente femenino Estradiol Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2171	Perfil adolescente masculino	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Testosterona total				
1288	Perfil androgenico (Hirsutismo) 17 Alfa-hidroxi progesterona serica Androstenediona Cortisol en suero Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-SO4) Dehidroepiandrosterona total (DHEA) Testosterona total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2179	Perfil Autoimmune I Ac anti nucleares Ac anti DNA Ac anti cardiolipinas (IgG) Ac anti mitocondriales Anticoagulante lupico	2.0 ml suero refrigerado. 2.0 ml plasma citrato.	Suero: Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon azul (con citrato).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2180	Perfil autoimmune II Ac anti SSA (Ro) Ac anti SSB (La) Ac anti Smith (Sm) Celulas L-E (Lupus eritematoso) Ac anti nucleares	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2182	Perfil autoimmune III Ac anti nucleares Ac anti DNA Ac anti mitocondriales Complemento C3 Complemento C4	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2185	Perfil cardiaco Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) Lactato deshidrogenasa Creatina cinasa (CK) Creatina cinasa MB (CK-MB)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1383	Perfil climaterio Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Estradiol	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2173	Perfil de alcoholismo Alcohol Bilirrubinas (BT ,BC ,BNC)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Colesterol					
	Fosfatasa alcalina					
	Gamma glutamiltransferasa					
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)					
	Trigliceridos					
2396	Perfil de alergenos MASTER	*	3.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ Envio sin solicitud de alergenos (pagina 10 y 11)
	Escoger 32 alergenos de la lista					
2174	Perfil de alergenos 12 Determinaciones	*	3.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ Envio sin solicitud de alergenos (pagina 10 y 11)
	Escoger 12 alergenos de la lista					
2324	Perfil de alergenos 6 determinaciones (alimenticios)	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ Envio sin solicitud de alergenos (pagina 10 y 11)
	Escoger 6 alergenos alimenticios de la lista					
1646	Perfil de alergenos 6 determinaciones (inhalatorios)	*	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ Envio sin solicitud de alergenos (pagina 10 y 11)
	Escoger 6 alergenos inhalatorios de la lista					
3175	Perfil de alergenos alimenticio	*	3.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ Alergeno alubia (Frijol blanco) Alergeno mezcla Col, Coliflor y Brocoli Alergeno zanahoria Alergeno chicharo Alergeno pimienta Verde Alergeno calabaza Alergeno jitomate Alergeno almendra Alergeno cacahuete Alergeno nuez Alergeno aguacate Alergeno manzana Alergeno platano Alergeno mezcla de citricos (limon, lima, naranja) Alergeno durazno Alergeno fresa Alergeno chocolate Alergeno levadura Alergeno avena Alergeno trigo Alergeno maiz cultivado Alergeno papa Alergeno arroz Alergeno soya

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS
VIGENTE HASTA PROXIMA

- Alergeno mezcla de mar (cangrejo, atun)
- Alergeno camarón
- Alergeno atun
- Alergeno carne de pollo
- Alergeno carne de cerdo
- Alergeno carne de pavo

Perfil de alergen^os Inhalatorios

- Alergeno abedul blanco
- Alergeno acacia
- Alergeno fresno blanco
- Alergeno mezquite
- Alergeno alamo
- Alergeno encino
- Alergeno avena
- Alergeno Sorghum SPP
- Alergeno amaranto
- Alergeno ambrosia
- Alergeno artemisa
- Alergeno epazote
- Alergeno diente de leon
- Alergeno alternaria
- Alergeno aspergillus
- Alergeno candida albicans
- Alergeno cladosporium herbarum
- Alergeno mucor racemus
- Alergeno penicilina G
- Alergeno Rhizopus nigricans
- Alergeno plumas de periquito
- Alergeno plumas de pato
- Alergeno plumas de ganso
- Alergeno cucaracha americana
- Alergeno polvo casero alergopharma
- Alergeno aligustre
- Alergeno pasto ballico
- Alergeno hierba timotea
- Alergeno atriflex confertifolia
- Alergeno franseria acathicarpa
- Alergeno lengua de vaca
- Alergeno broma tropicalis

Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).

2 días Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Alergeno epicoccum Alergeno gato Alergeno gato Alergeno acaro farinae Alergeno acaro pteronyssinus inmunoglobulina E				
1584	Perfil de alergenitos Leche de Vaca Ac anti proteina de leche de vaca (IgG) Ac anti proteina de leche de soya (IgG) Inmunoglobulina E	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2175	Perfil de Amenorrea Estradiol Hormona estimulante de tiroides (TSH) Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Indice de tiroxina libre (ITL) Prolactina serica Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1401	Perfil de Anemias I Biometria Hematica Hierro % de Saturacion de hierro Capacidad de union de hierro total Acido folico (Folatos) Ferritina Transferrina	2.0 ml suero refrigerado. 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2176	Perfil de Anemias II Vitamina B12 (Cianocobalamina) Acido folico (Folatos) Hierro Ferritina Transferrina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1171	Perfil de anticuerpos extraibles del nucleo AC. SSA (Ro) AC. SSB (La) Ac anti Smith (Sm) Ac anti ribonucleoproteina (RNP) Ac anti SCL-70 (Anti-Esclerodermia)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2178	Perfil de artritis Factor reumatoide cuantitativo	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Proteína "C" reactiva Acido urico Ac anti nucleares (ANA)				
1059	Perfil de Catecolaminas en orina Catecolaminas totales en orina Adrenalina en orina Noradrenalina en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
11	Perfil de Catecolaminas en plasma Dopamina en plasma Adrenalina en plasma Noradrenalina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 dias	
2190	Perfil de drogas de abuso I Cocaina Cannabinoides (Marihuana)	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1399	Perfil de drogas de abuso II Cocaina Cannabinoides (Marihuana) Anfetaminas	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1398	Perfil de drogas de abuso III Cocaina Cannabinoides (Marihuana) Anfetaminas Benzodiacepinas Opiaceos Barbituricos	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
121	Perfil de hemoglobina glucosilada Hb glucosilada A1c Hb total Hemoglobina A1c Glucosa promedio trimestral (GPT)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2198	Perfil de hepatitis A y B Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++
2356	Perfil de hepatitis A+B+C	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ag "e" de hepatitis B (HBeAg) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ag "s" de hepatitis B (HBsAg) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs) Ac anti hepatitis C (aHCV)				
1103	Perfil de hepatitis A+B+C+D Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs) Ag "s" de hepatitis B (HBsAg) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ag "e" de hepatitis B (HBeAg) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti hepatitis C (aHCV) Ac anti hepatitis D (HDV)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++
2199	Perfil de hepatitis B Fase Cronica (Memoria) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ag "s" de hepatitis B (HBsAg) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++
1441	Perfil de hepatitis B Infeccion Activa (Reciente) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++
1295	Perfil de Hierro/Cinetica de Hierro Hierro % de saturacion de hierro Capacidad de union de hierro total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++;Ictericia+++
1017	Perfil de Hipertension Aldosterona serica Catecolaminas totales en orina Cortisol en suero Renina Perfil de lipidos I	* 2.0 ml suero, 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA) y contenedor plastico limpio y con tapa de rosca.	3 dias	Hemolisis+++;Lipemia+++;Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1269	Perfil de Inmunoglobulinas Inmunoglobulina A Inmunoglobulina D Inmunoglobulina E Inmunoglobulina G Inmunoglobulina M	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1297	Perfil de Lipidos I Lipidos totales Colesterol Trigliceridos Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol VLDL	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Ictericia+++
1454	Perfil de Lipidos II Lipidos totales Colesterol Trigliceridos Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol VLDL Electroforesis de lipoproteinas	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Ictericia+++
2209	Perfil de Lipidos III Lipidos totales Colesterol Trigliceridos Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol VLDL Electroforesis de Lipoproteinas Colesterol libre Colesterol esterificado % colesterol esterificado	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Ictericia+++
1548	Perfil de Lupus Ac anti nucleares Complemento C3 Complemento C4 Complemento hemolitico 50 (CH50) Celulas L-E (Lupus eritematoso) T3 Uptake	2.0 ml suero refrigerado y sangre total.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo de tapon rojo sin centrifugar.	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2845	Perfil de metanefrinas en plasma Metanefrinas en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Normetanefrinas en plasma Metanefrinas totales en Plasma				
1594	Perfil de metanefrinas orina Metanefrinas totales en orina Metanefrinas en orina Normetanefrinas en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1508	Perfil de osteoporosis I Calcio Calcio en orina de 24 hrs. Depuracion de creatinina en orina de 24 hrs. Fosfatasa alcalina Osteocalcina Pyrilinks-D (Deoxipirinolina)	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total. 2.0 ml suero.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2226	Perfil de osteoporosis II Calcio Calcio en orina de 24 hrs. Depuracion de creatinina en orina de 24 hrs. Fosfatasa alcalina Osteocalcina Pyrilinks-D (Deoxipirinolina) Fosforo Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Estradiol Creatinina Creatinina en orina de 24 hrs Colesterol Trigliceridos Calcitonina Hormona paratiroidea (Parathormona/PTH-Intacta)	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen total. 2.0 ml suero.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1378	Perfil diabetico I Glucagon Hemoglobina A1c Insulina basal	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2188	Perfil diabetico II Glucosa Colesterol Trigliceridos Glucagon Hemoglobina A1c Insulina basal Peptido C Microalbumina en orina Examen general de orina	2.0 ml suero. 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada. 20 ml de orina ocasional.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2191	Perfil ginecologico Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Estradiol	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1512	Perfil Hipofisiario Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Hormona de Crecimiento basal Prolactina serica Hormona estimulante de Tiroides (TSH) Hormona adrenocorticotrofica (ACTH)	2.0 ml suero refrigerado. 2.0 ml plasma en EDTA.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1433	Perfil hormonal femenino I Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Estradiol Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2203	Perfil hormonal femenino II Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Estradiol Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal T3 Uptake Triyodotironina (T3) total Indice de tiroxina libre (ITL) Tiroxina (T4) total Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH)				
2206	Perfil hormonal masculino I Hormona Foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Estradiol Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2207	Perfil hormonal masculino II Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal T3 uptake Triyodotironina (T3) total Indice de tiroxina libre (ITL) Tiroxina (T4) total Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2441	Perfil infeccioso por PCR Chlamydia trachomatis por PCR Mycoplasma hominis por PCR Mycoplasma genitalium por PCR Neisseria gonorrhoeae por PCR Trichomonas vaginales Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum por PCR	* Cepillado uretral/cervico-vaginal.	Secrecion, medio de transporte especial.	7 dias	Medio inadecuado.
2212	Perfil Marcadores Tumorales Basico Fraccion Beta de HGC serica (cuantitativa) Alfafetoproteina (AFP) Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2214	Perfil Marcadores Tumorales de Colon/Recto CA 19-9 (Pancreas-Colon) Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2215	Perfil marcadores tumorales de estomago CA 72-4 (estomago) CA 19-9 (pancreas-colon) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2216	Perfil marcadores tumorales de higado CA 19-9 (pancreas-colon) Alfafetoproteina (AFP) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2217	Perfil marcadores tumorales de mama CA 15-3 (mama) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2218	Perfil marcadores tumorales de mieloma / linfoma Beta-2 microglobulina serica Alfafetoproteina (AFP) Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2219	Perfil marcadores tumorales de ovario CA 125 (ovario) CA 72-4 (estomago) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2220	Perfil marcadores tumorales de pancreas CA 19-9 (pancreas-colon) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2221	Perfil marcadores tumorales de prostata Antigeno prostatico especifico (PSA total) Antigeno Prostatico Fraccion libre (PSA libre) Fosfatasa acida fraccion prostatica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2222	Perfil marcadores tumorales de testiculo Fraccion beta de HGC serica (cuantitativa) Alfafetoproteina (AFP) B - HGC libre	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2223	Perfil marcadores tumorales de tiroides Tiroglobulina Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2409	Perfil metabolico	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Glucosa Colesterol Trigliceridos					
2405	Perfil neonatal ELISA (Tamiz metabolico ELISA) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 Alfa Hidroxiprogesterona neonatal Fenilalanina neonatal Inmunotripsina Reactiva 17 aminoacidos por cromatografia de capa fina	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
2224	Perfil neonatal I (Tamiz metabolico I) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 alfa hidroxiprogesterona neonatal	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
916	Perfil neonatal II (Tamiz metabolico II) Hormona estimulante de tiroides neonatal 17 aminoacidos por cromatografia de capa fina	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
1562	Perfil neonatal III (Tamiz metabolico III) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 Aminoacidos por cromatografia de capa fina	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
2025	Perfil neonatal IV (Tamiz metabolico IV) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 alfa hidroxiprogesterona neonatal 17 aminoacidos por cromatografia de capa fina	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
330	Perfil neonatal V (Tamiz Metabolico V) Hormona estimulante de Tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal Galactosa total 17 Aminoacidos por cromatografia de capa fina	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
2225	Perfil neonatal VI (Tamiz metabolico VI) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 Alfa Hidroxiprogesterona neonatal Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (neonatal)	*	5 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Galactosa total Inmunotripsina reactiva Biotinidasa 17 Aminoacidos por cromatografia de capa fina				
1516	Perfil ovarico Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Estradiol	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1564	Perfil paratiroideo Calcio Calcitonina Fosforo Hormona paratiroidea (parathormona / PTH-intacta)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2228	Perfil prenatal I Glucosa Urea Creatinina Biometria hematica Examen general de orina V.D.R.L. (Reacciones serolueticas) Grupo sanguineo y factor RH	2.0 ml suero. 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada. 20 ml orina (primera orina de la mañana).	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA), Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2229	Perfil prenatal II Glucosa Urea Creatinina Biometria hematica Ac anti toxoplasma gondii (IgG) Ac anti rubeola (IgG) Examen general de orina V.D.R.L. (Reacciones serolueticas) Grupo sanguineo y factor RH	2.0 ml suero. 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada. 20 ml orina (primera orina de la mañana).	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA), Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1306	Perfil preoperatorio Biometria hematica Examen general de orina	2.0 ml suero. 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada. 20 ml orina ocasional. 2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA), tubo tapon azul (con citrato) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++. No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

			Tiempo de protrombina (TP)			
			Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa)			
			Glucosa			
			Urea			
			Creatinina			
			Grupo sanguineo y factor RH			
1802	Perfil prostático I Antígeno prostático específico (PSA total) Fosfatasa ácida total Fosfatasa ácida fracción prostática	2.0 ml suero refrigerado.		Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2230	Perfil prostático II Antígeno prostático específico (PSA total) Antígeno prostático fracción libre (PSA libre) Fosfatasa ácida total Fosfatasa ácida fracción prostática Fosfatasa alcalina	2.0 ml suero refrigerado.		Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1002	Perfil renal I Urea Creatinina Depuración de creatinina en orina de 24 hrs. Examen general de orina Cultivo de orina (Urocultivo)	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), * indicar volumen total. 20 ml orina ocasional. 2.0 ml suero.		Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	3 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2232	Perfil renal II Urea Creatinina Depuración de creatinina en orina de 24 hrs. Examen general de orina Proteínas totales con relación A/G	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total. 20 ml orina ocasional. 2.0 ml suero.		Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
207	Perfil reumático Cultivo de exudado faríngeo Proteína "C" reactiva Factor reumatoide (FR latex) Anti estreptolisina O (ASO) Ácido urico	* Exudado Faríngeo en medio de transporte, 2.0 ml suero.		Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y medio de transporte AMIES.	3 días	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4293	Perfil SARS-CoV-2- anticuerpos (IgG e IgM) SARS-CoV-2 anticuerpos (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado.		Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 día	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

SARS-CoV-2 anticuerpos (IgM)					
1309	Perfil suprarrenal Cortisol en suero 17 alfa-hidroxiprogesterona serica Hormona adrenocorticotrofica (ACTH) Aldosterona serica	2.0 ml suero, 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1310	Perfil testicular Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
397	Perfil tiroideo basico Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) total Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1579	Perfil tiroideo I T3 uptake Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) total Indice de tiroxina libre (ITL) Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1580	Perfil tiroideo II T3 uptake Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) captacion Tiroxina (T4) total Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
419	Perfil tiroideo III T3 uptake Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) captacion Tiroxina (T4) total Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH) Ac anti microsomaes de peroxidasa (a-TPO) Ac anti tiroglobulina (a-TG) Tiroglobulina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2961	Perfil tiroideo IV	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) total Hormona estimulante de tiroides (TSH) Triyodotironina (T3) libre Tiroxina (T4) libre				
2962	Perfil tiroideo V Triyodotironina (T3) total Tiroxina (T4) total Hormona estimulante de tiroides (TSH) Triyodotironina (T3) libre Tiroxina (T4) libre T3 uptake Indice de tiroxina libre (ITL) Yodo proteico (IP)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1437	Perfil TORCH I (IgG) Ac anti toxoplasma gondii (IgG) Ac anti rubeola (IgG) Ac anti citomegalovirus (IgG) Ac anti herpes I (IgG) Ac anti herpes II (IgG)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
199	Perfil TORCH II (IgM) Ac anti toxoplasma gondii (IgM) Ac anti rubeola (IgM) Ac anti citomegalovirus (IgM) Ac anti herpes I (IgM) Ac anti herpes II (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1438	Perfil TORCH III (IgG e IgM) Ac anti toxoplasma gondii (IgG) Ac anti toxoplasma gondii (IgM) Ac anti rubeola (IgG) Ac anti rubeola (IgM) Ac anti citomegalovirus (IgG) Ac anti citomegalovirus (IgM) Ac anti herpes I (IgG) Ac anti herpes I (IgM) Ac anti herpes II (IgG) Ac anti herpes II (IgM)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1311	Plasminogeno (Plasminogenico funcional)	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
213	Plomo en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	4 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
214	Plomo en sangre	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	4 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra coagulada

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

218	Porfobilinogeno en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
219	Potasio	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
220	Potasio en orina de 24 horas	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
934	Prealbumina en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
223	Primidona	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	5 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2062	Procalcitonina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
224	Progesterona serica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
225	Prolactina serica	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1214	Proteina "C" reactiva	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2426	Proteina A (PAPP-A)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
322	Proteina C de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	2 dias	Tubo mal aforado.
226	Proteina C reactiva ultra sensible	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2554	Proteina de crecimiento placentario	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
323	Proteina S de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	6 dias	Tubo mal aforado.
227	Proteinas de Bence Jones	* 20 ml orina ocasional.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1380	Proteinas en liquido cefalorraquideo	* 2.0 ml LCR refrigerado.	Jeringa asegurando embolo..	3 dias	Muestra insuficiente.
230	Proteinas en orina	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
545	Proteinas totales	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2363	Proteinas totales con relacion A/G	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2142	Prueba inmunologica de embarazo en orina	20 ml orina ocasional refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1329	Prueba inmunologica de embarazo en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

2143	Pruebas de compatibilidad (cruzadas)	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada de donadores y receptor.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2193	Pruebas de funcion hepatica (PFH) Bilirrubina total Bilirrubina conjugada Bilirrubina no conjugada Albumina Globulina Relacion albumina / globulina Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) Proteinas totales Fosfatasa alcalina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2144	Pyrilinks-D (Deoxipirinolina)	* 20 ml orina refrigerada.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	3 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1322	Quimica sanguinea de 3 elementos Glucosa Urea Creatinina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1319	Quimica sanguinea de 4 elementos Glucosa Urea Creatinina acido urico	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1320	Quimica sanguinea de 5 elementos Glucosa Urea Creatinina Acido urico Colesterol	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1407	Quimica sanguinea de 6 elementos Glucosa Urea Creatinina Acido urico Colesterol Trigliceridos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
691	Quimica sanguinea de 12 elementos Glucosa Urea	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Creatinina				
	Acido urico				
	Colesterol				
	Trigliceridos				
	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)				
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)				
	Fosfatasa alcalina				
	Bilirrubina total				
	Bilirrubina Conjugada				
	Bilirrubina no Conjugada				
	Proteinas totales				
	Albumina				
	Globulina				
	Relacion albumina / globulina				
2258	Quimica sanguinea de 18 elementos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++;Ictericia+++
	Glucosa				
	Urea				
	Nitrogeno ureico (BUN)				
	Creatinina				
	Acido urico				
	Colesterol				
	Trigliceridos				
	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)				
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)				
	Fosfatasa alcalina				
	Lactato deshidrogenasa				
	Bilirrubina total				
	Bilirrubina conjugada				
	Bilirrubina no conjugada				
	Proteinas totales				
	Albumina				
	Globulina				
	Relacion albumina / globulina				
	Calcio				
	Potasio				
	Cloro				
1533	Quimica sanguinea de 24 elementos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++;Ictericia+++
	Glucosa				
	Urea				
	Creatinina				
	Acido urico				
	Colesterol				
	Trigliceridos				
	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)				
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)				
	Bilirrubina total				

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

	Bilirrubina conjugada Bilirrubina no conjugada Fosfatasa alcalina Proteinas totales Albumina Globulina Relacion albumina / globulina Lactato deshidrogenasa Gamma glutamiltransferasa Sodio Potasio Cloro Calcio Fosforo Hierro Colesterol HDL				
1687	Quimica sanguinea de 27 elementos Glucosa Urea Creatinina Acido urico Colesterol Trigliceridos Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) Bilirrubina total Bilirrubina conjugada Bilirrubina no conjugada Fosfatasa alcalina Proteinas totales Albumina Globulina Relacion albumina / globulina Lactato deshidrogenasa Gamma glutamiltransferasa Sodio Potasio Cloro Calcio Fosforo Hierro Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol VLDL	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1659	Quimica sanguinea de 28 elementos Glucosa	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

- Urea
- Creatinina
- Acido urico
- Colesterol
- Trigliceridos
- Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)
- Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)
- Bilirrubina total
- Bilirrubina conjugada
- Bilirrubina no conjugada
- Fosfatasa alcalina
- Proteinas totales
- Albumina
- Globulina
- Relacion albumina / globulina
- Lactato deshidrogenasa
- Gamma glutamiltransferasa
- Sodio
- Potasio
- Cloro
- Calcio
- Fosforo
- Hierro
- Colesterol HDL
- Colesterol LDL
- Colesterol VLDL
- Indice Aterogenico

2281	Quimica sanguinea de 33 elementos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
	Glucosa				
	Urea				
	Nitrogeno ureico (BUN)				
	Creatinina				
	Relacion BUN / creatinina				
	Acido urico				
	Colesterol				
	Colesterol HDL				
	Colesterol LDL				
	Colesterol VLDL				
	Indice aterogenico				
	Trigliceridos				
	Proteinas totales				
	Albumina				
	Globulina				
	Relacion albumina / globulina				
	Bilirrubina total				
	Bilirrubina conjugada				
	Bilirrubina no conjugada				

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
 VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

- Aspartato aminotransferasa (AST / TGO)
- Alanina aminotransferasa (ALT / TGP)
- Fosfatasa alcalina
- Gamma glutamiltransferasa
- Amilasa
- Calcio
- Lactato deshidrogenasa
- Hierro
- Fosforo
- Sodio
- Potasio
- Cloro
- Dioxido de Carbono
- Anion Gap

1700	Quimica sanguinea de 38 elementos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++;Lipemia+++;Ictericia+++
	Glucosa				
	Urea				
	Creatinina				
	Nitrogeno ureico (BUN)				
	Acido urico				
	Colesterol				
	Trigliceridos				
	Relacion BUN / creatinina				
	Aspartato aminotransferasa (AST / TGO)				
	Alanina aminotransferasa (ALT / TGP)				
	Bilirrubina total				
	Bilirrubina conjugada				
	Bilirrubina no conjugada				
	Fosfatasa alcalina				
	Fosfatasa acida total				
	Lactato deshidrogenasa				
	Gamma glutamiltransferasa				
	Lipidos totales				
	Proteinas totales				
	Albumina				
	Globulina				
	Relacion albumina / globulina				
	Sodio				
	Potasio				
	Cloro				
	Dioxido de carbono				
	Calcio				
	Magnesio				
	Fosforo				
	Hierro				
	Colesterol HDL				
	Colesterol LDL				

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

Colesterol VLDL
Amilasa
Lipasa
Creatina cinasa (CK)
Creatina cinasa MB (CK-MB)
Indice aterogenico

238	Reacciones febriles	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2148	Reaginas plasmaticas rapidas (RPR)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4371	Relacion albumina / creatinina en orina	20 ml orina ocasional o 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
240	Renina	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4362	Resistencia a la insulina (HOMA-IR)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
	Glucosa Insulina basal				
2895	Resistencia a la proteina C activada	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
2910	Resistencia a la proteina S activada	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	3 dias	Tubo mal aforado.
1451	Reticulocitos	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
302	Rosa de Bengala (Anticuerpos anti - brucella)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
246	Rotavirus en heces	Heces (tamaño de una nuez).	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
247	Salicilatos (acido acetilsalicilico)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
739	Sangre oculta en heces	Heces (tamaño de una nuez).	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
567	Serotonina	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	4 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1645	Sirolimus	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
250	Sodio	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
251	Sodio en orina de 24 horas	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2151	Somatomedina C (IgFBP-3)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

1588	Somatomedina C (IgF-I)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2153	Somatotropina (GH)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2158	T3 uptake	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2499	Tacrolimus (Prograf)	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
4255	Tamizaje de hemoglobinas en tamiz neonatal	* 2 circulos de sangre total en tarjeta Guthrie.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
255	Teofilina (Aminofilina)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
257	Testosterona libre	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
256	Testosterona total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
259	Tiempo de protrombina (TP)	2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 dia	Tubo mal aforado.
4272	Tiempo de reptilasa	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	5 dias	Tubo mal aforado.
261	Tiempo de trombina (TT)	2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 dia	Tubo mal aforado.
262	Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa)	2.0 ml plasma con citrato refrigerado.	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato).	1 dia	Tubo mal aforado.
265	Tincion de Gram	Liquido corporal extendido en laminilla sin fijar.	Portalaminilla rotulada.	1 dia	Muestra insuficiente.
269	Tincion de tinta china	LCR extendido en laminilla sin fijar.	Portalaminilla rotulada.	1 dia	Muestra insuficiente.
1392	Tincion de Wright	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Muestra insuficiente.
270	Tincion de Ziehl Neelsen	Liquido corporal.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca, tubo esteril o jeringa esteril.	1 dia	Muestra insuficiente.
271	Tiroglobulina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2154	Tiroxina (T4) captacion	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2156	Tiroxina (T4) libre	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2157	Tiroxina (T4) neonatal	* 2 circulos de sangre en tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	Tarjeta Guthrie. Ver pagina 20.	3 dias	Ver pagina 21.
2155	Tiroxina (T4) total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2360	Tiroxina (T4) yodo	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3167	Topiromato	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	10 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

3153	Toxoplasma gondii por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
279	Transferrina	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3048	Transglutaminasa tisular (TTG)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	7 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
281	Trigliceridos	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
321	Triple marcador gestacional	* 2.0 ml suero cuestionario y USG.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++. Sin cuestionario y/o USG (pagina 13).
2160	Triyodotironina (T3) libre	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2159	Triyodotironina (T3) total	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1518	Troponina I	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
290	Troponina T	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
284	Urea en suero	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1651	Urea en orina 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	1 dia	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
286	V.D.R.L. (Reacciones serolueticas)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
546	Vasopresina (Hormona antidiuretica)	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	2 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
288	Velocidad de sedimentacion globular (VSG)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2163	Vitamina A (Retinol)	* 3.0 ml suero protegido de la luz.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) protegido de la luz.	16 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2014	Vitamina B1 (Tiamina)	* 2.0 ml suero protegido de la luz.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) protegido de la luz.	8 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
291	Vitamina B12 (Cianocobalamina)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2164	Vitamina B6 (Piridoxina)	* 3.0 ml plasma EDTA protegido de la luz.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA) protegido de la luz..	11 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2165	Vitamina C (Acido ascorbico)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	12 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
292	Vitamina D (25 OH)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2166	Vitamina E (Alfa gamma tocoferol)	* 3.0 ml suero protegido de la luz.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	11 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2528	Vitamina K	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	12 dias	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

CATALOGO DE ESTUDIOS LABORATORIO DE REFERENCIA ELI S.A. DE C.V. 2023.
VIGENTE HASTA PROXIMA ACTUALIZACION DE LISTAS. ESTA LISTA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES.

293	Western Blot (Confirmatoria P/VIH 1)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2714	Western Blot (Confirmatoria P/VIH 2)	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2707	Western Blot para el virus de la hepatitis C	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	3 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2168	Yodo butanolico (IB)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1272	Yodo proteico (IP)	2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	1 dia	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3076	Zika por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA).	7 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
295	Zinc en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen total.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	8 dias	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2169	Zinc en suero	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador).	4 dias	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
<https://labelisa.com.mx>



Pregunta por nuestro servicio de consulta y descarga vía web.



SÍGUENOS EN FACEBOOK COMO
Laboratorio de Referencia Eli SA de CV



ALIADO COMERCIAL



VENTA DE:

- ✓ Reactivo.
- ✓ Material para toma de muestra.
- ✓ Equipos e instrumentos para laboratorio clínico.
- ✓ Misceláneos para laboratorio.

CONTACTO:

Tels.: 55 63 87 69 99 y 55 63 87 70 00

Correo: marsacontacto98@gmail.com

UBICACIÓN:

Félix Parra # 39, 3er piso, Col. San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900 en Ciudad de México.



CORNING



SIEMENS



DIAGON®



SIGMA-ALDRICH



MEDIS

El contenido de este Catálogo estará vigente hasta su próxima actualización. En caso de que se realicen cambios parciales se notificará mediante un aviso formal.



Si el estudio que requiere no aparece en este documento o necesita información sobre proceso de alto volumen (campañas), le pedimos se comuniquen con nuestras gerencias de ventas.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



LABORATORIO DE REFERENCIA ELI[®]
S.A. DE C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología